

## AEROCHAMBER PLUS MASK ADULTI

**Marchio:** GlaxoSmithKline  
**Codice Min.:** 906240813  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

### AEROCHAMBER PLUS MASK ADULTI

Camera di Inalazione con Valvola da utilizzarsi con nebulizzatori predosati, con mascherina per pazienti di età superiore ai 5 anni.



#### Modalità d'uso:

Prima dell'uso, assicurarsi che la camera di inalazione con valvola AeroChamber Plus\* ("VHC") sia stata pulita secondo le istruzioni e che le informazioni fornite unitamente al nebulizzatore siano state lette.

- rimuovere il cappuccio di protezione dal boccaglio del nebulizzatore;

- esaminare l'AeroChamber Plus\* VHC per verificare che non vi sia nulla all'interno;
- inserire il boccaglio del nebulizzatore nel connettore verso il nebulizzatore situato sul retro;
- tenere saldamente in mano l'apparecchio con il nebulizzatore e agitarlo energicamente 4 o 5 volte. Accertarsi che il boccaglio del nebulizzatore all'interno dell'AeroChamber Plus\* VHC sia orientato direttamente verso la mascherina;
- applicare delicatamente la mascherina sul viso, in modo che aderisca bene attorno al naso e alla bocca;
- premere il nebulizzatore una volta sola iniziando a inalare lentamente. Tenere saldamente la mascherina sul viso del paziente per 5-6 respiri. Per ottenere il risultato migliore, incoraggiare il paziente a respirare attraverso la bocca. L'aria espirata fuoriesce dalla mascherina attraverso la valvola di espirazione. Il fischietto FLOWSIGNAL\* emette un sibilo quando il paziente inspira troppo velocemente;
- attendere 30 secondi prima di ripetere le operazioni indicate nei punti 4-6, secondo quanto prescritto.

#### Istruzioni per la pulizia:

Pulire l'apparecchio soltanto come indicato nelle istruzioni prima di utilizzarlo per la prima volta e, successivamente, ogni settimana.

- 1- rimuovere solamente il connettore verso il nebulizzatore dal retro del dispositivo (non rimuovere la mascherina);
- 2- immergere entrambe le parti in acqua tiepida contenente detergente liquido delicato per 15 minuti. Agitare delicatamente;
- 3- scuotere il dispositivo per rimuovere l'acqua in eccesso. Non strofinare per asciugare;
- 4- lasciare asciugare all'aria in posizione verticale;
- 5- reinserire il connettore verso il nebulizzatore quando il dispositivo è completamente asciutto.

#### Avvertenze:

Non comprimere nell'AeroChamber Plus\* VHC tutti i soffi in una volta per poi inalarli. Inalare un soffio alla volta. Non lasciare incustodito nelle mani di bambini. Limitarsi a smontare AeroChamber Plus\* VHC secondo quanto indicato nelle istruzioni per la pulizia, per evitare di danneggiare il dispositivo. Per domande sul funzionamento o l'utilizzo del dispositivo, contattare il medico, farmacista o infermiere di fiducia. Pulire l'AeroChamber Plus\* VHC soltanto come indicato nelle istruzioni per la pulizia, per garantirne il corretto funzionamento. Non mettere in lavastoviglie. Non utilizzare l'AeroChamber Plus\* VHC in comune con altri. Il dispositivo deve essere usato esclusivamente da lei.