

## AIR KIT ACCESSORI DI RICAMBIO PER AEROSOL PIC

**Marchio:** Pic Solution  
**Codice Min.:** 8003670666998  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)

### AIR KIT ACCESSORI DI RICAMBIO PER AEROSOL PIC



Tutti gli apparecchi per aerosolterapia hanno in dotazione il tubo per la connessione agli accessori e l'ampolla o sfera dove viene introdotto il farmaco. Oltre a questi necessari complementi vi sono gli accessori attraverso i quali viene inalato il farmaco nebulizzato: boccaglio, forcella od erogatore nasale, mascherine adulti e pediatriche. Ciascun paziente dovrebbe avere

la propria dotazione composta da tubo, ampolla nebulizzatrice e boccaglio, mascherina, forcella nasale, per evitare qualsiasi contaminazione microbica derivante dall'uso dell'apparecchio da parte di utilizzatori diversi. Gli accessori sono una parte molto importante dell'apparecchio e per un ottimale funzionamento devono essere accuratamente puliti dopo ogni terapia e sostituiti periodicamente. Se ne consiglia la sostituzione dopo circa 100-120 terapie.

#### Accessori di ricambio:

Gli accessori (boccaglio, forcella od erogatore nasale, mascherine adulti e pediatriche) devono essere disinfettate a freddo con alcool denaturato mentre il tubo di raccordo deve essere risciacquato con acqua. Le ampolle nebulizzatrici Sidestream® e Ventstream® Pro, smontate nei loro componenti, devono essere immerse in acqua in ebollizione per circa 5 minuti.

#### Avvertenze:

Se ne consiglia la sostituzione almeno ogni 25-30 terapie.