

ALUNEB GEL NASALE 10 ML

Marchio: -
Codice Min.: 935239653
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Aluneb gel nasale Aluneb gel nasale è un dispositivo medico a base di ialurosomi brevettati di acido ialuronico ad alto peso molecolare, pantenolo e vitamina E ad azione umettante ed idratante nei casi di secchezza ed infiammazione della mucosa nasale. Il gel è caratterizzato da elevata mucoadesività e prolungata permanenza "in situ", proprietà grazie alle quali risulta essere un adeguato complemento per reintegrare il film liquido che ricopre la mucosa nasale. Grazie alla sua delicata formulazione è indicato in tutti i casi di naso irritato a causa di rinorrea dovuta a raffreddore e a varie forme di riniti. Consigliato in caso di secchezza e atrofia della mucosa nasale dovute a condizioni patologiche (riniti allergiche, rinite vasomotoria). Aiuta a ridurre le conseguenze di epistassi anche di origine traumatica. Dopo trattamenti farmacologici (decongestionanti, cortisonici, antistaminici), a contatto con

agenti esterni irritanti (polvere, fumo, smog, pollini o microrganismi). Favorisce i processi di riparazione della mucosa nasale dopo un intervento chirurgico. Agevola esami endoscopici e/o manovre di tamponamento. Previene le irritazioni e lesioni della mucosa nasale derivanti dall'uso prolungato di cannule nasali per l'ossigenoterapia. Utile nella prevenzione e nel trattamento delle screpolature da raffreddore delle aree perinasali. Formula brevettata basata su una nuova tecnologia lipido-polimerica (ialurosomi) con acido ialuronico, che potenzia l'azione idratante, lenitiva e riepitelizzante del pantenolo e della vitamina E. Modalità d'uso Applicare 3 o 4 volte al giorno a seconda delle necessità. Effettuare un lieve massaggio esterno alla base del naso per distribuire uniformemente il gel all'interno. Aluneb gel nasale può essere utilizzato frequentemente e per lunghi periodi. In caso di irritazione della zona perinasale, applicare il prodotto anche sulla cute intorno alle narici. Il prodotto va applicato dopo un'accurata pulizia del naso attraverso l'utilizzo di soluzioni saline. In caso di terapia con farmaci quali decongestionanti, cortisonici e antistaminici applicare il prodotto 10-15 minuti dopo il trattamento farmacologico. Ingredienti Pantenolo, sodio ialuronato, vitamina E acetato. Avvertenze Dispositivo medico CE. Indicato per bambini ed adulti. Formato Tubo da 10 ml. (Cod.) 016300