

## ANIMALINTEX IMPACCO CATAPLASMA

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 910410190  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



| ANIMALINTEX® PER LO ZOCCOLO |                 | ANIMALINTEX®                  |                    |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| IMPACCO CALDO               | IMPACCO FREDDO  | IMPACCO CALDO                 | IMPACCO FREDDO     |
| Lacerati, corchie           | Lacerati, scade | Abrasioni, contusioni         | Tendiniti, desmiti |
| Impedimento del flettere    |                 | Ferte contaminato ed irritate | Schinelle          |
| Sobrietture                 |                 | Ascessi                       | Traumi             |

animalintex Impacco per trattamenti a livello di piede e gamba, sagomati per una maggiore facilità d'utilizzo e per evitare inutili sprechi di materiale. - Impacco caldo: abrasioni e contusioni, ferite contaminate ed infette, ascessi. - Impacco freddo: tendiniti, desmiti, schinelle, traumi. Modalità d'uso 1) Pulire completamente la zona da trattare. 2) Porre Animalintex in una bacinella poco profonda, con la superficie plastificata rivolta all'esterno (non usare alcun recipiente se non dopo averlo pulito accuratamente). 3) Versare l'acqua nel recipiente intorno ai bordi di Animalintex. 4) Non immergere. 5) Dopo che si è ben impregnato d'acqua, rimuovere dalla bacinella l'impacco ed eliminare, con una leggera pressione, l'acqua in eccesso. 6) Applicare l'impacco sull'area interessata con la superficie plastificata all'esterno (non a contatto con la cute), modellandolo ai margini della zona d'applicazione. 7) Applicare una fasciatura contenitiva esterna assicurandosi che l'impacco sia completamente coperto. Formato 1 busta contiene 1 falda.