

ASPIRATORE NASALE NARHINEL SOFT 1 PEZZO + 2 RICAMBI

Marchio: NARHI
Codice Min.: 8018031001080
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Narhinel Aspiratore Nasale Soft Aspiratore dal beccuccio morbido, adatto a neonati e bimbi. Dopo aver ammorbidito il muco con la soluzione fisiologica, usare Narhinel Aspiratore Nasale Soft per liberare in maniera delicata il naso chiuso, consentendo una buona respirazione e facilitando la poppata e il sonno. L'aspirazione nasale è consigliata soprattutto prima della poppata o prima di allattare. Questo prodotto è stato pensato per rimuovere facilmente le secrezioni nasali. Il beccuccio morbido contiene un filtro assorbente per offrire un'elevata igiene, anche per la mamma, durante l'aspirazione. Prima di utilizzare l'Aspiratore Nasale Soft usare flaconcini monouso di soluzione fisiologica per ammorbidire il muco e facilitarne l'aspirazione. È facile da usare, occorre: - inserire il beccuccio

morbido del ricambio nell'aspiratore; - mettere in bocca la bocchetta di aspirazione e inserire in una delle narici del bambino l'estremità del beccuccio morbido; - aspirare delicatamente, lentamente e regolarmente attraverso la bocchetta, prima in una narice e poi nell'altra; - terminata l'operazione, togliere il beccuccio usato, gettarlo e sostituirlo con un nuovo ricambio. Componenti Aspiratore: polipropilene, stirene etilene butilene stirene, silicone. Ricambi: PVC e melamina schiuma. Non contiene ftalato e bisfenolo A. Avvertenze Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservazione Tenere lontano da fonti di calore. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conervare nella confezione originale. Formato Confezione contenente 1 aspiratore e 2 ricambi.