

ATOMIX WAVE DISPOSITIVO PER IGIENE RINOFARINGEA ATOMIX SOLUZIONE SALINA 250 ML 2 PEZZI + TERMINALE NASALE + EROGATORE ASOFFIETTO

Marchio: Tred Medical
Codice Min.: 8388765624481
Link: [clicca qui per acquistare](#)



TRED medical ATOMIX wave Descrizione Dispositivo medico Classe I che consente di rimuovere le secrezioni rapprese presenti nel rimo-faringe. Il rinofaringe, posto alla fine delle cavità nasali, è la centralina fisiopatologica più importante del distretto nasale; la congestione rinofaringea rappresenta la prima ed essenziale tappa patogenetica delle infiammazioni respiratorie, spesso complicate da sovrapposizioni infettive: flogosi acute rino-sino-ottiche, rinofaringiti allergiche, tosse cronica intermittente. Componenti Sodio cloruro, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, acqua depurata. Non

contiene conservanti. Modalità d'uso Iniziare soffiando il naso, poi svitare il tappo azzurro del soffietto erogatore, riempirlo fino alla ghiera con la soluzione contenuta nei flaconi, inserire il terminale nasale e spingerlo fino a contatto con la ghiera. Porsi sopra un lavabo con il capo chinato in avanti (non inclinato lateralmente), introdurre il terminale azzurro nella narice dalla quale si respira meglio; è necessario creare una perfetta aderenza in modo tale che la narice sia persistentemente chiusa. Premere il soffietto con azione unica, decisa e continua: è importante che durante la spremitura la narice sia mantenuta totalmente chiusa dal terminale, ed il capo mantenuto inclinato in avanti. Soffiare il naso, togliere il terminale nasale, rabboccare la soluzione residua fino alla ghiera, quindi ripetere con le stesse modalità il lavaggio rinofaringeo dalla narice opposta. Al termine, rovesciare verso il basso il soffietto e spremere fino a svuotamento e lasciarlo asciugare all'aria, quindi avvitare il tappo azzurro per chiuderlo. Lavare con acqua e sapone il terminale, asciugarlo e riporre il tutto in luogo pulito. Formato Contenuto della confezione: - 1 erogatore a soffietto - 1 terminale nasale dedicato - 2 Flaconi da 250 ml di ATOMIX wave - Soluzione salina ipertonica, tamponata a pH 6. Cod. ATOW001