

AUDISPRAY JUNIOR 3-12 ANNI SOLUZIONE DI ACQUA DI MARE IPERTONICA SPRAY SENZA GAS IGIENE ORECCHIO 25ML

Marchio: AUDISPRAY
Codice Min.: 912467281
Link: [clicca qui per acquistare](#)



AUDISPRAY JUNIOR Descrizione Audispray Junior è uno spray auricolare appositamente studiato per i bambini dai 3 ai 12 anni. Contiene una soluzione di acqua di mare ipertonica e microbiologicamente testata, associata a glicerolo, che protegge la pelle del condotto uditivo del bambino. Audispray Junior rappresenta un'alternativa ai cotton fioc. Audispray Junior ammorbidisce e scioglie delicatamente il cerume in eccesso, facilitandone l'espulsione naturale verso l'esterno. Audispray Junior contiene glicerolo il quale, grazie alle sue proprietà idratanti e ammorbidenti, rispetta la fragilità delle orecchie dei bambini. Audispray Junior non contiene gas, è dotato di un beccuccio anti-sovrappressione e permette un'igiene regolare delle orecchie. Audispray Junior utilizzato regolarmente offre una detersione dell'orecchio del bambino e previene la

formazione di tappi di cerume. Erogatore brevettato:- il sistema di diffusione privo di gas offre una nebulizzazione delicata; - la pompa dosatrice eroga una quantità idonea di soluzione nelle orecchie; - il beccuccio brevettato adattato all'anatomia dell'orecchio limita il rischio di sovrappressione. Permette il trattamento delicato dei tappi di cerume. Facilita l'estrazione dei tappi di cerume presso il medico. Audispray Ultra è uno spray utilizzabile a partire dai 3 anni. Audispray Junior è un dispositivo medico destinato alla detersione auricolare, conforme alla Normativa Europea 93/42/CEE. Modalità d'uso Per bambini dai 3 ai 12 anni: da 1 a 2 nebulizzazioni per orecchio, 2 volte la settimana. Per i bambini con un'abbondante produzione di cerume: Audispray Junior si utilizza tutti i giorni. 1. Orientare il beccuccio verso l'orecchio del bambino, quindi effettuare da 1 a 2 nebulizzazioni per orecchio, mantenendo il flacone in posizione verticale. 2. Massaggiare la base dell'orecchio per qualche secondo. 3. Piegare la testa del bambino di lato per eliminare il prodotto in eccesso e asciugare. 4. Risciacquare il beccuccio con acqua calda dopo ogni applicazione. Avvertenze Controindicazioni: non utilizzare su bambini che portano tubini timpanostomici, in caso di otite, perforazione del timpano, e come regola generale, su bambini che abbiano avuto episodi come vertigini, interventi medici o chirurgici a livello dell'orecchio o del timpano, etc. Precauzioni d'uso: in caso di dubbi o dolori precedenti l'utilizzo del prodotto, consultare un farmacista o un medico. In caso di tappi di cerume già formati, Audispray Junior può provocare un rigonfiamento del tappo con conseguenti disagi. In questo caso consultare un medico. Qualsiasi grave incidente connesso all'uso di Audispray Junior dovrà essere notificato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro a cui l'utente è soggetto. Conservazione Audispray Junior deve essere utilizzato entro un anno dall'apertura del flacone. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla scatola e sul flacone. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione e sul flacone. Conservare a temperature comprese tra i -2°C e i

+40°C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Flacone spray da 25 ml. Cod. 7DP002