

BLEFARETTE BABY SALVIETTINE OCULARI MEDICATE MONOUSO 30 PEZZI

Marchio: BLEFARETTE
Codice Min.: 939410357
Link: [clicca qui per acquistare](#)



BLEFARETTE BABY Salviette monouso. Blefarette BABY è una morbida salvietta monouso, in tessuto non tessuto, per i suoi componenti, è in grado di fornire un'attività umettante e detergente di pulizia delle palpebre e delle ciglia. Blefarette BABY è indicata per un'accurata detersione quotidiana della delicata zona perioculare. L'impiego di Blefarette BABY risulta particolarmente valido anche nei casi di reazioni infiammatorie del bordo palpebrale. Modalità d'uso Igiene quotidiana degli occhi: con mani ben pulite, aprire la bustina ed estrarre la salvietta. Dispiegare completamente la salvietta e passarla delicatamente sul bordo palpebrale e sulle ciglia mantenendo l'occhio chiuso. In caso di secrezioni difficili da rimuovere, di stati infiammatori del bordo palpebrale (congiuntiviti,

blefarocongiuntiviti, orzaioli) e occlusioni del canale lacrimale, è preferibile effettuare con Blefarette BABY degli impacchi caldo umidi nella zona interessata. A tale scopo scaldare la bustina immergendola ancora sigillata per 3-5 minuti in acqua tiepida (40°C). Dopo averla riscaldata, aprire la bustina, estrarre la salvietta e mantenendola piegata, massaggiare la zona interessata per 1-2 minuti mantenendo l'occhio chiuso. In caso di prurito o gonfiore delle palpebre è consigliabile eseguire impacchi freddi nella zona interessata per ottenere un effetto decongestionante. A tale scopo raffreddare la bustina in frigorifero almeno per un'ora. Aprire la bustina ed applicare la salvietta mantenendola piegata nella zona interessata per 1-2 minuti, avendo cura di mantenere l'occhio chiuso. Componenti Algae, Dimeticone copoliolo, Coccoilpolipeptide di soia, Sodio cloruro, Caprilil/capril glucoside, Alcol 2-felietilico, Sodio metile, p-idrossibenzoato, Sodio propile p-idrossibenzoato, Acqua depurata. Avvertenze Non utilizzare in caso di una nota incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. In caso di impacchi caldi o freddi utilizzare la salvietta seguendo attentamente le modalità d'uso indicate. Utilizzare con cautela sui bambini al di sotto dei 3 anni. La salvietta una volta scaldata va utilizzata per l'impacco entro pochi minuti oppure deve essere gettata. Non utilizzare in caso di bustina non integra. Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Uso esterno. Non risciacquare dopo l'uso. Formato 30 salviette