


BLEFASTOP GARZA CON HY-TER IN COTONE PIEGATA CON FILO DI BARIO 28 PEZZI

Marchio: -
Codice Min.: 972264636
Link: [clicca qui per acquistare](#)

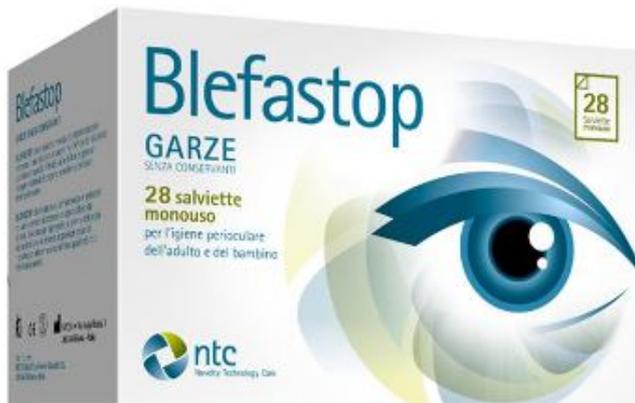

Blefastop È una salvietta monouso di cotone naturale imbevuta di una soluzione a base di Hy-Ter (acido ialuronico più estratti naturali di Melaleuca) e di Aloe in grado di svolgere un'attività detergente, emolliente, lenitiva e decongestionante. È formulato con antinfiammatori ed antisettici naturali e consente di ottenere un rapido sollievo dai sintomi. Una corretta igiene oculare e perioculare è importante in tutte le situazioni di infiammazione ed infezione in atto o potenziale. Blefastop, grazie al sistema Hy-Ter risulta particolarmente indicato per l'igiene delle palpebre e

delle ciglia e come coadiuvante dell'antisettico nel pre e post chirurgico e nel trattamento di congiuntiviti batteriche ed allergiche e di blefarocongiuntiviti. Modalità d'uso - Aprire la bustina strappandola in prossimità dell'apposita tacca di apertura. - Dispiegare completamente la salvietta e passarla delicatamente sulla palpebra e sulle ciglia partendo dall'angolo interno dell'occhio e procedendo verso l'angolo esterno, tenendo l'occhio chiuso. - Ripetere l'operazione per 1-2 minuti, sempre partendo dall'angolo interno dell'occhio, fino a ottenere una totale asportazione delle secrezioni oculari e di eventuali depositi di altro tipo (pulviscolo, polveri, trucco, ecc.). Alcuni pazienti potrebbero avvertire un leggero e temporaneo bruciore al momento del massaggio oculare o subito dopo. Utilizzare una salvietta per ogni occhio. Lavarsi le mani dopo l'uso. Non risciacquare l'occhio dopo l'uso. Impacco caldo: per aumentare l'efficacia della rimozione meccanica delle secrezioni oculari, immergere la busta integra in acqua calda a una temperatura non superiore a 45°C per 10 minuti. Una volta scaldata, la salvietta va subito utilizzata per l'impacco. Impacco freddo: per aumentare il sollievo oculare, specialmente in caso di occhi rossi e gonfi, refrigerare la bustina a una temperatura non inferiore ai 5°C per 10 minuti. La particolare compatibilità del prodotto con la zona oculare e la sua ottimale composizione ne permettono l'uso anche da parte di portatori di lenti a contatto. Componenti Acqua, PEG / PPG - 20 / 15 dimeticone, estratto di aloe barbadensis, hy-ter (sodio ialuronato, 4-terpineolo), ammonio glicirizzato, caprylyl/capryl glucoside, sodio cocoyl amminoacidi del grano, etilesiglicerina, alcol feniletilico, cloruro di sodio, fosfato di sodio, fosfato bisodico, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 olio di ricino idrogenato. Avvertenze Non sono noti effetti collaterali relativi all'utilizzo del dispositivo. In caso di comparsa di effetti collaterali, contattare il proprio medico. Uso esterno: solo per applicazione cutanea dell'area perioculare, mantenendo l'occhio chiuso. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ai componenti; in caso di bruciore persistente sospendere il trattamento. Non riutilizzare le salviette

parzialmente utilizzate, in quanto ciò può comportare il rischio di inefficacia e di contaminazione del prodotto. Ogni bustina è monouso e deve essere aperta solo immediatamente prima dell'uso. Non utilizzare in caso di bustina non integra o confezione danneggiata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire il prodotto. Conservazione Non utilizzare Blefastop dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservare a temperatura ambiente ed evitare il contatto con l'acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Formato Confezione da 28 salviette monouso. Cod. HYT006