

## **BLEFASTOP PLUS GARZA IN COTONE PIEGATA CON FILO DI BARIO 28SALVIETTE MONOUSO + 1 COMPRESSA OCULARE RISCALDABILE**

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 972264648  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



COMPRESSA OCULARE RISCALDABILE

Blefastop Plus GARZE Salviette monouso di cotone naturale imbevute di una soluzione a base di Hy-Ter (acido ialuronico più estratti naturali di Melaleuca) e di Aloe in grado di svolgere un'attività detergente, emolliente, lenitiva e decongestionante. Formulate con antinfiammatori ed antisettici naturali e consentono di ottenere un rapido sollievo dai sintomi. Indicate per l'igiene delle palpebre e delle ciglia sia quotidiana sia in presenza di patologie oculari di tipo allergico, infiammatorio o infettivo quali blefariti o blefarocongiuntiviti. Nella blefarite posteriore si riscontra anche una occlusione delle ghiandole di Melbomio che si trovano all'interno della palpebra e che secernono un olio, essenziale per impedire l'evaporazione del film lacrimale. Il trattamento con compresse calde (40-45°C) associate al massaggio palpebrale permette l'apertura e la pulizia di queste

ghiandole bloccate e può consentire loro di riprendere la produzione naturale dei lipidi (oli) necessari per un film lacrimale sano. Modalità d'uso - Riscaldare la compressa fino al suo viraggio di colore (dall'arancione al giallo). Il viraggio di colore indica infatti che la compressa ha raggiunto i 43°C, temperatura ideale per il massaggio palpebrale - Tenendo la compressa oculare calda per la linguetta, massaggiare la palpebra per 3-5 minuti esercitando una lieve pressione. - Subito dopo l'applicazione della compressa oculare calda, aprire la bustina strappandola in prossimità dell'apposita tacca di apertura. - Dispiegare completamente la salvietta e passarla delicatamente sulla palpebra e sulle ciglia partendo dall'angolo interno dell'occhio e procedendo verso l'angolo esterno, tenendo l'occhio chiuso. Modalità di riscaldamento della compressa oculare È possibile riscaldare la compressa in vari modi: - Mantenere la compressa sotto acqua corrente molto calda fino al viraggio del colore. - Immergere la compressa in un contenitore (bicchiere) riempito con acqua calda fino al viraggio del colore (dall'arancione al giallo). Controllare sempre la temperatura della compressa prima del massaggio oculare, toccandola con l'interno del polso. Se troppo calda, aspettare qualche minuto e riprovare. - Verificare l'integrità della compressa prima di riusarla. Riporre la compressa nella confezione, sciacquandola prima in acqua. Utilizzare una salvietta per ogni occhio. Lavarsi le mani dopo l'uso. Non risciacquare l'occhio dopo l'uso. Componenti Acqua, PEG / PPG - 20 / 15 dimeticone, estratto di aloe barbadensis, hy-ter (sodio ialuronato, 4-terpineolo), ammonio glicirizzato, caprylyl/capryl glucoside, sodio cocoyl amminoacidi del grano, etilesiglicerina, alcol feniletilico, cloruro di sodio, fosfato di sodio, fosfato bisodico, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 olio di ricino idrogenato Avvertenze Non sono noti effetti collaterali relativi all'utilizzo del dispositivo. In caso di comparsa di effetti collaterali, contattare il proprio medico. Uso esterno: solo per applicazione cutanea dell'area periorbitale, mantenendo l'occhio chiuso. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ai componenti; in caso di bruciore persistente sospendere il

trattamento. Rispettare le modalità di riscaldamento e di controllo della temperatura della compressa oculare. Non riutilizzare le salviette parzialmente utilizzate, in quanto ciò può comportare il rischio di inefficacia e di contaminazione del prodotto. Ogni bustina è monouso e deve essere aperta solo immediatamente prima dell'uso. Non utilizzare in caso di bustina non integra o confezione danneggiata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non forare la compressa oculare e/o ingerire il prodotto. Gettare la compressa oculare dopo aver utilizzato l'ultima salvietta. Conservazione Non utilizzare Blefastop Plus dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservare a temperatura ambiente ed evitare il contatto con l'acqua. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato. Formato 28 salviette monouso + 1 compressa oculare riscaldabile da utilizzarsi per il numero di salviette. Cod. HYT007