

## BORAL SPRAY AURICOLARE 100 ML

**Marchio:** BORAL  
**Codice Min.:** 939068146  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**BORAL Spray auricolare** Descrizione Prodotto indicato per rimuovere impurità presenti nell'orecchio attraverso un'azione meccanica. Crea una barriera difensiva nei confronti di agenti patogeni esterni. Componenti Glicerina, acido bórico, potassio sorbato, sodio benzoato, sodio idrossido sol. 30%, acqua depurata. Modalità d'uso Portare l'erogatore all'ingresso della cavità dell'orecchio e premere una o due volte fino a farne uscire la quantità desiderata. Inclinare leggermente la testa durante l'applicazione. Ripetere l'operazione secondo necessità o secondo prescrizione medica. Avvertenze Non ingerire. Rimuovere eventuali apparecchi acustici prima di utilizzare Boral. Evitare il contatto con gli occhi. Nel caso di contatto accidentale, lavare gli occhi con abbondante acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Pulire accuratamente l'erogatore dopo l'utilizzo. Richiudere il flacone dopo l'uso. Non

disperdere il contenitore nell'ambiente. Non utilizzare in caso di timpano perforato o di terapia farmacologica concomitante. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Se ne sconsiglia l'uso in gravidanza. Non utilizzare se allergici o ipersensibili ad uno dei componenti. Qualora il prodotto dia luogo a fenomeni di sensibilizzazione, interrompere il trattamento e consultare il medico. Prima di utilizzare su bambini consultare il medico al fine di una corretta diagnosi. Conservazione La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non esporre a fonti di calore. Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere il flacone dopo l'uso. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Flacone da 100 ml. Cod. 220