

BRAVA CEROTTO ELASTICO RETTANGOLARE IDROCOLLOIDALE PER STOMIA 20 PEZZI

Marchio: COLOPLAST
Codice Min.: 926080021
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Cerotto Elastico Idrocolloide Descrizione Il cerotto elastico idrocolloide Brava è indicato per sostenere e livellare il bordo della placca del dispositivo per stomia in quanto garantisce un'adesione aggiuntiva. Può essere utilizzato sulla cute peristomale integra: grazie alla sua composizione idrocolloide svolge un'azione protettiva e livellatrice. È disponibile in quattro diversi formati: mezzaluna; rettangolare; con rinforzo e

mezzaluna XL. Prodotto monouso, non contiene lattice e ftalati. Cerotto elastico a mezzaluna: può essere usato nei normali casi in cui occorre evitare che la placca del presidio di arricci e si stacchi, quando la placca è ovale/rotonda. Cerotto elastico rettangolare: può essere utilizzato con la stessa funzione in caso di placche rettangolari/quadrate. Cerotto elastico con rinforzo: può essere utilizzato su addomi complessi (molto ampi, in presenza di laparocèle, ecc.) o nei casi in cui occorre avere una maggiore superficie adesiva che supporti la placca del presidio. Cerotto elastico a mezzaluna XL: può essere usato nei casi in cui occorre una maggiore superficie adesiva per livellare ed evitare che la placca del presidio di arricci e si stacchi, quando la placca è ovale/rotonda e per aumentare il senso di sicurezza dell'utilizzatore e la tolleranza in caso di mal posizionamento. Componenti Miscela di idrocolloidi. Avvertenze Il riutilizzo di questo prodotto monouso può determinare un rischio potenziale per l'utente. Trattamento, detersione, disinfezione e sterilizzazione possono compromettere le caratteristiche del prodotto, il che a sua volta determinerebbe un ulteriore rischio di danno fisico o infezione per il paziente. Prima dell'applicazione verificare che i prodotti si trovino a temperatura ambiente. Il prodotto non contiene componenti ecotossici pertanto non necessita di particolari protocolli di smaltimento. Non disperdere nell'ambiente in quanto non è biodegradabile. Conservazione Evitare l'esposizione diretta alla luce solare. Conservare i prodotti orizzontalmente in un luogo fresco e asciutto. I prodotti non devono essere conservati a temperature inferiori allo 0. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato Confezione da 20 cerotti. Disponibili: -Cerotto elastico idrocolloide a mezzaluna; -Cerotto elastico idrocolloide con rinforzo; -Cerotto elastico idrocolloide rettangolare; -Cerotto elastico idrocolloide XL. Cod. 12070, 12072, 12074, 12076