

BUONA SPRAY-SOL KIT 5 PEZZI 1 SPRAY SOL + 1 SIRINGA LUER LOCK DA 5 ML + 1 AGO CANNULA + ELEFANTINO COPRI-SIRINGA

Marchio: STEVE JONES
Codice Min.: 980792105
Link: [clicca qui per acquistare](#)



BUONA SPRAY-SOL Descrizione Dispositivo medico indicato per la somministrazione rino-sinusale saline e/o di soluzioni contenenti farmaci ad uso aerosolico per trattamenti topici delle vie aeree superiori. Progettato per consentire la somministrazione rapida della soluzione tramite nebulizzazione in particelle di grandezza tra 10 e 20 micron. La forma appositamente studiata ed il materiale morbido utilizzato per l'erogatore lo rendono adatto alla narice del bambino, ma può essere utilizzato anche dall'adulto. L'ago cannula, in dotazione con Buona Spray-sol, permette di prelevare soluzioni saline e/o soluzioni contenenti farmaci ad uso aerosolico da qualsiasi tipo di flaconcino o contenitore. L'Elefantino copri-siringa rende il lavaggio del naso un momento piacevole

e di gioco per i bambini. Contiene: - 1 Spray-sol, dispositivo medico per la nebulizzazione; - 1 Siringa Luer Lock - Soft-Ject; - 1 contenitore personalizzabile per riporre e conservare tutti i componenti di Buona Spray-sol; - 1 ago cannula, dispositivo medico per il prelievo della soluzione; - 1 Elefantino copri-siringa. Modalità d'uso Staccare un flaconcino monodose, scaldarlo fra le mani prima di somministrare la soluzione e aprirlo ruotando il cappuccio. Aspirare la soluzione da nebulizzare con la siringa Luer Lock: - con flaconcini NEBIAL 3% e ISONEBIAL non è necessario l'utilizzo dell'ago cannula in quanto l'apertura del flaconcino si adatta perfettamente alla siringa Luer Lock; - con altri tipi di flaconcini o contenitori: agganciare l'ago cannula alla siringa, aspirare la soluzione da nebulizzare e successivamente staccare l'ago cannula dalla siringa. Agganciare l'Elefantino copri-siringa al nebulizzatore Spray-sol, assicurandosi che la faccia dell'elefantino sia rivolta verso il nebulizzatore, ed avvitare la siringa riempita con la soluzione all'apposito ugello di ingresso del nebulizzatore Spray-sol. Nei lattanti e bambini piccoli (sotto i 3 anni e comunque in funzione del livello di collaborazione) è necessario effettuare il lavaggio in posizione sdraiata su un fianco, tenendo la testa reclinata da un lato e inserendo delicatamente il nebulizzatore Spray-sol nella narice superiore. Spingere sul pistone della siringa per nebulizzare la soluzione. Nei bambini più grandi e negli adulti, tenere il busto in avanti con il capo lievemente inclinato su un lato ed inserire il nebulizzatore Spray-sol nella narice superiore. Spingere sul pistone della siringa per nebulizzare la soluzione. Ripetete le medesime operazioni anche per l'altra narice, cercando di suddividere equamente la soluzione contenuta nella siringa tra le due narici. Durante il trattamento la soluzione nebulizzata può gocciolare dal naso. Al termine di ogni utilizzo, prima di riporre i componenti nell'apposito astuccio, lavarli come riportato di seguito: - lavare il nebulizzatore Spray-sol sotto l'acqua corrente, con l'eventuale aggiunta di una goccia di sapone neutro (non abrasivo). Prima di riporlo, asciugare il nebulizzatore Spray-sol con un panno morbido; - sciacquare

corpo e pistone della siringa sotto l'acqua corrente e asciugarli accuratamente prima di rimontare la siringa; - sciacquare l'ago cannula sia internamente che esternamente con acqua corrente e lasciarlo asciugare all'aria; - lavare con acqua corrente ed asciugare con un panno morbido l'Elefantino copri-siringa ed il contenitore personalizzabile. Accertarsi che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di riporli all'interno del contenitore personalizzabile. Avvertenze Impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso a cui è destinato. L'uso del nebulizzatore Spray-sol e dell'ago cannula da parte di bambini o di persone non autosufficienti deve avvenire sotto la supervisione di un adulto. Non utilizzare Buona Spray-sol sotto i 3 mesi di età. Prima di ogni utilizzo, controllare che i dispositivi Spray-sol, siringa ed ago cannula, non siano danneggiati; se risultassero danneggiati non utilizzarli. Per la frequenza di utilizzo attenersi alle indicazioni riportate sull'etichetta della soluzione da nebulizzare o alle indicazioni del Medico. Per motivi igienici il nebulizzatore Spray-sol è destinato ad un solo paziente, ma può essere riutilizzato per più nebulizzazioni. Per il riutilizzo, effettuare la pulizia seguendo le istruzioni. La siringa e l'ago cannula in dotazione possono essere riutilizzati più volte in quanto destinati all'uso nasale. Utilizzare il nebulizzatore Spray-sol finché è mantenuta l'integrità meccanica e la capacità di nebulizzare la soluzione. Si consiglia di non utilizzare il nebulizzatore Spray-sol®, siringa e ago cannula oltre i 6 mesi dal primo impiego. Conservazione Conservare il prodotto al riparo da umidità, luce e fonti di calore. Formato Kit da 5 pezzi: - 1 Spray-sol, dispositivo medico per la nebulizzazione; - 1 Siringa Luer Lock - Soft-Ject; - 1 contenitore per riporre e conservare tutti i componenti di Buona Spray-sol; - 1 ago cannula; - 1 copri-siringa. Cod. 3064