

## **CAMERA DISTANZIATRICE PER EROGATORI SPRAY PREDOSATI L'ESPACE220ML PEDIATRICO SPAZIO MORTO 49ML CON MASCHERA VALVOLA INSPIRAZIONE 2 VALVOLE ESPIRAZIONE CODICE COLORE GIALLO**

**Marchio:** Air Liquide  
**Codice Min.:** 905727362  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



L'espacedo Descrizione Camera distanziatrice per spray predosati. L'utilizzo della camera distanziatrice è raccomandato dalle Linee Guida internazionali per la corretta terapia dell'asma. Il distanziatore è consigliato per l'adeguata deposizione del farmaco nelle vie aeree inferiori, poiché l'uso diretto dell'inalatore, data l'elevata velocità del farmaco in uscita, causerebbe la concentrazione di medicinale nebulizzato nell'oro-faringe. L'espacedo aiuta a limitare gli effetti collaterali della deposizione orofaringea del farmaco e facilita il coordinamento tra l'atto inspiratorio e l'erogazione con lo spray predosato. L'espacedo semplifica la terapia e garantisce un trattamento più efficace con tutti gli inalatori predosati grazie ad un'adeguata diffusione del farmaco nebulizzato nelle vie aeree inferiori. Forma conica la cui dinamica di flusso rende disponibile una maggior frazione di farmaco aumentando

la deposizione nelle basse vie aeree. Volumetria ideale: L'espacedo riduce la riaggregazione delle particelle di farmaco nebulizzato grazie alla volumetria studiata specificatamente. Fondo lamellare: L'espacedo è dotato di lamelle ad apertura variabile che si adeguano alla forza dell'atto inspiratorio del paziente, facilitando la terapia. Maschera anatomica ed ergonomica che facilita la compliance anche dei più piccoli. Ottima aderenza con la minima pressione. Sistema valvole: la valvola colorata è un valido aiuto per il controllo visivo degli atti respiratori. Il movimento risulta ben evidente: permette un corretto coordinamento tra l'erogazione del farmaco e l'inspirazione e consente di contare gli atti respiratori. Fondo con innesto universale per tutti gli spray predosati MDI (Metered Dose Inhalers). Tutti i modelli sono sterilizzabili a 121°C. Basse cariche elettrostatiche. Sacchetto in tessuto per una migliore igiene e un trasporto più sicuro. Materiali durevoli e robusti. Privo di lattice. Modalità d'uso 1 - prima dell'utilizzo, esaminare con attenzione il prodotto verificando che sia assemblato correttamente e che non vi siano corpi estranei o componenti mancanti. Rimuovere ogni corpo estraneo prima dell'uso; 2 - prima dell'utilizzo, leggere le istruzioni fornite con l'MDI. Rimuovere il coperchio dall'MDI; 3 - introdurre l'MDI nel fondo; 4 - mettere il boccaglio in bocca e tenerlo tra le labbra; 5 - premere l'MDI ed inalare lentamente attraverso la bocca. Mantenere il boccaglio in bocca con le labbra ben aderenti per almeno 5 atti respiratori dopo aver premuto l'inalatore. Durante l'inspirazione dalle aperture sul fondo entra aria che facilita l'inalazione del nebulizzato. L'aria espirata esce attraverso la valvola di espirazione; 6 - attendere 30 secondi prima di somministrare un'altra dose di farmaco (ripetere gli step 4-5), o come indicato dal medico. Somministrare solo un puff di farmaco per volta e seguire le indicazioni di dosaggio del medico. Pulizia qualora il dispositivo sia utilizzato sempre dalla stessa persona pulirlo come indicato. Qualora il dispositivo sia utilizzato da più persone si rende necessaria, dopo ogni utilizzo, oltre

alla pulizia, anche una sterilizzazione in autoclave a 121°C per 15 minuti. Il dispositivo può essere sterilizzato senza compromettere le sue caratteristiche funzionali fino a 20 volte, dopodiché è necessario sostituirlo. Se ritenuto opportuno, per una pulizia approfondita, è possibile far bollire il dispositivo oppure lavarlo in lavastoviglie. A - il prodotto dovrebbe essere pulito seguendo le seguenti istruzioni prima del primo utilizzo e poi almeno una volta a settimana: rimuovere fondo e maschera; B - lasciare le parti a bagno per 15 minuti in acqua tiepida con detergente neutro ad azione disinfettante. Agitare delicatamente; C - risciacquare in acqua pulita; D - scuotere per eliminare l'acqua in eccesso come mostrato. Non utilizzare panni asciutti per asciugare le parti del dispositivo. Assicurarsi che le parti siano asciutte prima di riassemblearle; E - rimettere il fondo e la maschera in posizione quando le parti sono completamente asciutte e pronte per l'uso. Centrare la freccia di allineamento presente sul componente posteriore con l'incavo di allineamento presente sul corpo come mostrato. Avvertenze Sostituire il prodotto nel caso vi sia un componente danneggiato. Alcuni componenti per la loro dimensione potrebbero essere inghiottiti dai bambini. Non lasciare incustoditi questi componenti. E' sempre necessaria la presenza di un adulto. Non smontare il prodotto oltre quanto indicato nelle istruzioni relative alla pulizia. Nel caso di dubbi sull'uso del prodotto consultare il medico o il farmacista. Pulire il prodotto solo come indicato in queste istruzioni per assicurarne l'efficacia di funzionamento. Conservazione Quando non utilizzato, conservare il prodotto in un contenitore pulito. Sostituire il prodotto dopo 24 mesi di uso continuo. Formato - Fondo giallo: maschera per bambini 2-6 anni; - fondo arancio: maschera per bambini 0-2 anni; - fondo magenta: maschera per adulti. Cod. 471351 (fondo giallo) 471352 (fondo arancio) 471386 (fondo magenta)