

## CANDINORM IDROGEL EQUILIBRA GEL 50 ML

**Marchio:** CANDINORM  
**Codice Min.:** 944840786  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Candinorm Idrogel Equilibra** Descrizione Dispositivo medico per uso vaginale che, grazie all'azione di sostanze funzionali specifiche quali fibra prebiotica a base di GOS e FOS, Acido Caprilico e Acido Lattico, favorisce il riequilibrio della microflora vaginale. La fibra idrosolubile di GOS Bioecolia e FOS Actilight, ad attività prebiotica, favorisce il ripristino ed il riequilibrio dell'ecosistema microbico vaginale, il Gliceril-4-Caprato, precursore dell'Acido Caprilico, e l'Acido Lattico favoriscono il ripristino di un pH vaginale fisiologico (tra 3,5 e 4,2) e contrastano la crescita di microrganismi

patogeni responsabili di vulvo-vaginiti (Candida), vaginosi batteriche ed infezioni delle vie urinarie. Modalità d'uso Applicare Candinorm Idrogel Equilibra 1 volta al giorno, preferibilmente di sera. Proseguire il trattamento per 5 giorni consecutivi o secondo prescrizione. Per il corretto uso del Dispositivo Medico occorre: lavare le mani prima dell'applicazione; aprire la monodose ruotando e, staccando il cappuccio, inserire delicatamente l'applicatore in vagina; applicare il contenuto esercitando una pressione sul corpo del contenitore monodose. Non riutilizzare eventuali residui contenuti nel monodose. Non lascia residui, non unge, non macchia. Componenti GOS (Gluco-Oligosaccaridi), FOS (Fruttoligosaccaridi), Gliceril-4-Caprato, Acido Lattico, Carragenine, Potassio Sorbato, Acqua. Privo di coloranti. Avvertenze Il prodotto è per uso vaginale. Utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni d'uso. Il trattamento dovrebbe essere iniziato e concluso nel periodo intermestruale. Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso i componenti. Non utilizzare in caso di lesioni e/o ulcere della mucosa vaginale. In gravidanza accertata o presunta ed in caso di utilizzo di altri farmaci per uso vaginale concomitanti l'impiego del prodotto, consultare il medico o il farmacista prima dell'uso. L'uso prolungato di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico o il farmacista. Il prodotto non è destinato all'uso pediatrico. Non utilizzare il prodotto qualora la confezione risulti danneggiata o non perfettamente integra. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura inferiore a 25°C, al riparo da fonti di calore e luce. Validità a confezione integra: 24 mesi. Formato 5 monodose da 10 ml l'uno.