

CANNULA RETTALE NEONATI IN SILICONE 4MM

Marchio: -
Codice Min.: 930196934
Link: [clicca qui per acquistare](#)



CANNULA RETTALE NEONATI IN SILICONE Dispositivo medico CE. Cannula rettale per neonati, 100% silicone platinico medical grade, indicata per facilitare l'evacuazione di aria e feci dall'intestino dei neonati. Fabbricata in materiale biocompatibile ed idrorepellente. Facilmente lavabile. Non sterile, non contiene lattice, non contiene ftalati. Disponibile in diversi diametri (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm). Lunghezza 10 cm. Modalità d'utilizzo - Prima di ogni uso provvedere alla pulizia ed igienizzazione del prodotto. - Introdurre delicatamente la punta della cannula, dalla parte del diametro inferiore, nell'ano del neonato. - Estrarre il dispositivo con massima delicatezza. Controindicazioni Non utilizzare in soggetti con accertata sensibilità al silicone. Avvertenze Prima dell'uso

controllare attentamente il dispositivo per verificare eventuali danni e usura. Non utilizzare prodotti danneggiati. Evitare accuratamente che il dispositivo venga a contatto con oggetti taglienti e pungenti che potrebbero danneggiarlo. Evitare il contatto del dispositivo con solventi, olii e grassi. Pulizia e Disinfezione - Dopo ciascun utilizzo rimuovere, sotto acqua corrente, eventuali residui esterni ed interni alla cannula. - Immergere il prodotto in una soluzione detergente/disinfettante (per la determinazione della concentrazione seguire le indicazioni del produttore del detergente/disinfettante). - Accertarsi che tutta la superficie interna della cannula venga a contatto con la soluzione disinfettante. - Risciacquare il dispositivo sotto acqua corrente, avendo cura di indirizzare il getto d'acqua anche all'interno del lume della cannula. - Asciugare con cura, possibilmente in posizione verticale e comunque lontano da fonti di calore. Conservazione Conservare in ambiente fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare ed artificiale e da fonti di calore. Formato 1 pezzo.