

CAVIGLIERA STABIGIB BIVALVA GIBAUD ORTHO

Marchio: GIBAUD
Codice Min.: 903628257
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Dr.GIBAUD ORTHO Cavigliera Stabigib bivalva Indicata nei casi di distorsioni di caviglia gravi o di media gravità e stabilizzazione laterale dell'articolazione della caviglia. Controindicato nei casi di traumi gravi per cui occorre un trattamento ortopedico o chirurgico. Modalità d'utilizzo
Regolare la distanza tra le due valve, a livello del tallone, agendo sui tiranti laterali della talloniera. Applicare le valve ad entrambi i lati della caviglia in modo da coprire i malleoli. Applicare e stringere la cinghia inferiore. Infilare il piede che indossa l'ortesi in una calzatura spaziosa e stabile (la scarpa deve essere regolabile con i lacci o con chiusura autoadesiva). Regolare la chiusura della scarpa. Applicare la cinghia superiore. Dopo qualche giorno di utilizzo, le cinghie possono allentarsi, in questo caso stringere di nuovo

adeguatamente. Se compare un disturbo localizzato allentare le cinghie e riposizionare le valve. I cuscinetti ad aria sono già pressurizzati in modo tale da non richiedere ulteriori regolazioni, tuttavia il tubicino in dotazione consente di gonfiarli o sgonfiarli in caso di necessità. Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio: - Pulire le parti in plastica con un panno umido. - Le protezioni laterali removibili possono essere lavate a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri. - Sciacquare accuratamente. - Non strizzare. - Lasciare asciugare orizzontalmente. - Non stirare. Componenti Scocca: 100% polipropilene. Talloniera: 100% poliammide. Protezione: 100% poliuretano. Cinghie: 100% poliammide. Formato Confezione da 1 pezzo. Taglia: Unica. Altezza: 26 cm Lato d'utilizzo: Può essere utilizzata sia per la caviglia destra sia per la caviglia sinistra. Cod.5G0616X00BA00