

CEROTTO CALLIFUGO TRATTAMENTO RIMOZIONE/PROTEZIONE CALLI 4 CEROTTI IDROREPELLENTI + 4 DISCHETTI CALLIFUGHI

Marchio: SCHOLLS
Codice Min.: 5052197025897
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Scholl Calli Dispositivo medico CE, classe III. Trattamento per la rimozione dei calli e la protezione della pelle sana circostante. Ideale per calli sulle dita e sulla pianta dei piedi. Il cuscino morbido dona sollievo dal dolore e dalla pressione delle scarpe. Con acido salicilico. Adesivo dermatologicamente testato. Modalità d'uso Assicurarsi che il piede sia pulito e asciutto. Rimuovere il cerotto callifugo dall'incarto. Applicare il dischetto sul centro del callo, on l'adesivo ricolto verso la cute. Coprire con il cerotto idrorepellente, fissarne quindi i lati. Ripetere giornalmente fino a quando il callo non risulta completamente rimosso. Avvertenze Non usare in caso di diabete o di gravi problemi circolatori o danni nervosi; se si è sensibili all'acido acetilsalicilico o a qualcuno degli ingredienti; se l'area

intorno al callo è infiammata, ferita o irritata. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di gravidanza o allattamento al seno, se non sotto prescrizione medica. Se il cerotto è applicato su pelle sana possono verificarsi irritazioni e rash cutanei: in tal caso rimuovere il cerotto sospendere temporaneamente l'utilizzo. Quando l'irritazione è diminuita, riapplicare il cerotto al callo con attenzione. Contattare il dottore s si verificano altri disturbi o effetti collaterali. Formato 4 cerotti idrorepellenti + 4 dischetti callifughi. Cod. 8105230