

## CEROTTO PER SUTURA STERISTRIP SRISCIA 6 X 75 MM 6 PEZZI

**Marchio:** STERISTRIP  
**Codice Min.:** 930048451  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Steri-Strip Dispositivo medico CE. Suture cutanee adesive per piccole ferite e tagli. Prodotto sterile, traspirante per un buon comfort; con buona tenuta, colore bianco. Rinforzato. Tiene uniti i margini delle ferite per una guarigione più veloce e un buon risultato. Disponibile in varie dimensioni: 3mm X 75 mm, 6mm X 75 mm, 12mm X 100mm, 6mm X 100 mm. Istruzioni per l'uso 1) Accertarsi che la ferita non sanguini più ed il taglio sia pulito. Pulire la cute almeno 5 cm intorno alla ferita e lasciare che si asciughi completamente. 2) Aprire la busta in plastica ed estrarre il supporto in carta con le strisce di sutura; strappare una delle due linguette di carta all'estremità. Per ridurre un possibile arricciamento, le strisce dovrebbero essere rimosse dal supporto con un angolo di 45 gradi. 3)

Iniziando dal punto centrale della ferita, applicare la prima metà della striscia di sutura trasversalmente rispetto al taglio e, avvicinando i bordi della ferita, fare aderire l'altra metà della striscia, premendo fermamente ma avendo cura di non esercitare un'eccessiva tensione. 4) Completare la chiusura della ferita con strisce supplementari posizionate a circa 2 - 3 millimetri di distanza tra loro per l'eventuale drenaggio dell'essudato. 5) Per rimuovere le strisce adesive per sutura steri-strip, applicare una leggera pressione al centro della striscia per sutura, e poi sollevare ogni estremità verso la ferita e, delicatamente, rimuovere tutta la striscia. Avvertenze Prodotto sterile purché la busta non sia danneggiata o aperta. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. Formato Confezioni da 6 e 10 pezzi. Cod. 1540NP/ 1547NP/ 1546NP/ 1541NP. Numero di registrazione marchio CE0086