

CEROTTO SPRAY HANSAPLAST 50 APPLICAZIONI 32,5 ML

Marchio: HANSAPLAST
Codice Min.: 903924797
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Hansaplast Dispositivo medico CE, cerotto spray agisce rapidamente contro i batteri. Lo spray protegge la ferita e rimane trasparente. La pellicola spruzzata è flessibile e può essere applicata anche in punti scomodi e difficili da raggiungere. Lo strato applicato è resistente all'acqua e protegge per diversi giorni. Solo per piccole ferite, tagli e abrasioni minori, non è adatto a tagli che sanguinano abbondantemente. Modalità d'uso Pulire e asciugare la parte interessata prima dell'applicazione. Tenere la bomboletta a 5-10 cm dalla parte interessata. Spruzzare un lieve strato e lasciare asciugare per circa un minuto. Il cerotto scompare gradualmente nel tempo. Si potrebbe avvertire una sensazione di dolore pungente per breve tempo dopo l'applicazione. Se compare un'irritazione

interrompere l'utilizzo del prodotto. Componenti Copolimero acrilico; polimero poliuretano; etanolo; acqua; dimetiletere. Formato Bomboletta da 32,5 ml.