

CEROTTO SPRAY

Marchio: FARMACARE
Codice Min.: 975063239
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Farmacare CEROTTO SPRAY Descrizione Dispositivo Medico. Il Cerotto Spray fornisce un'istantanea ed invisibile protezione delle ferite. Il film che viene depositato è flessibile, resistente all'acqua e fornisce una protezione per più giorni. Consigliato per piccole ferite, abrasioni, escoriazioni e tagli. Non è indicato per ferite profonde, scottature e ferite infette. Modalità d'uso Pulire bene la cute prima dell'applicazione. Erogare il prodotto da una distanza di 5-10 cm. Spruzzare un piccolo strato di prodotto e lasciare asciugare per almeno 1 minuto. Il cerotto sparisce gradualmente con trascorrere dei giorni. Composizione Dimethyl ether, ethyl acetate, pentane, acrylates/dymethylaminoethyl methacrylate copolymer. Avvertenze Subito dopo l'applicazione potrebbe comparire una sensazione di bruciore: in tal caso o in caso di insorgenza di irritazione, sospendere l'impiego del prodotto. Non usare in prossimità di occhi, bocca, mucose in generale e genitali. Aerosol estremamente

infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare nemmeno dopo l'uso. Non usare il prodotto in quantità eccessiva ed impropria. Evitare il contatto con occhi e mucose, non applicare su parti irritate. Non spazzare negli occhi. In caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso che la pellicola/cerotto catturi un eccesso di polvere o particolato, pulire e riapplicare. Conservazione Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C. Termine ultimo di conservazione dalla data di produzione, in confezione integra: 36 mesi. Formato Bomboletta spray da 40 ml.