

## CHETOSIL REPAIR SPRAY BARRIERA PROTETTIVA 125 ML

**Marchio:** CHETOSIL REPAIR  
**Codice Min.:** 936008299  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Chetosil REPAIR SPRAY Dispositivo medico in polvere che favorisce il ripristino delle normali condizioni fisiologiche necessarie alla rigenerazione spontanea della cute. Grazie agli ingredienti presenti, crea una barriera protettiva ed assorbe l'eventuale essudato prevenendo la macerazione delle lesioni e la formazione di eventuali infezioni. Il prodotto è utilizzabile nel piede diabetico, nel piede dell'atleta e nelle lesioni da decubito e in presenza di piccoli tagli. La funzione barriera è esplicata dall'associazione di caolino e dell'amido con l'acido ialuronico. Il caolino (o argilla bianca) e l'amido sono in grado di assorbire la frazione acquosa presente nel caso di ferite con essudato; l'acido ialuronico finemente disperso favorisce la cicatrizzazione delle ferite grazie alle sue elevate proprietà filmogene ed idratanti. Inoltre, l'argento MicroSilver BG inglobato nella struttura, garantisce la stabilità delle proprietà filmogene del prodotto. Il prodotto agisce con una duplice azione: isola il punto di

applicazione, creando un micro ambiente di lesione adatto a una veloce cicatrizzazione spontanea; resiste agli attacchi microbici limitandone l'arrivo sul punto di applicazione. Modalità d'uso Prima dell'utilizzo, pulire bene la cute ed asciugarla accuratamente. Applicare un sottile strato di polvere solo nella zona interessata. Non massaggiare. Ripetere l'operazione due volte al giorno. Ingredienti Kaolin, aluminum starch octenylsuccinate, sodium hyaluronate, silver, butane, disiloxane, isobutane, propane. Avvertenze Controindicato per persone con ipersensibilità accertata verso i componenti. Non sono noti fenomeni di sovradosaggio. Non sono note interazioni con farmaci e sostanze medicinali. Dopo l'applicazione non massaggiare la zona interessata; la polvere deve formare uno strato continuo e protettivo. Evitare il contatto con gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente con acqua. Evitare lunghi periodi di erogazione. Uso esterno, non ingerire. Non utilizzare se la confezione risultasse aperta o danneggiata. Non sterilizzare. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Sospendere il trattamento in presenza di anomale reazioni cutanee. In caso di uso prolungato consultare il medico. L'applicazione non necessita di personale specializzato. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non fare uso diverso da quello previsto. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Formato Spray da 125 ml. (Cod.) 03622