

## CIAMBELLA GONFIABILE PER INVALIDI IN GOMMA ROSSA TEAM DELUXE CON POMPA 43CM DIAMETRO

Marchio: -

Codice Min.: 909892871

Link: [clicca qui per acquistare](#)



Ciambella gonfiabile Deluxe 43 Descrizione Ciambella gonfiabile per invalidi in gomma rossa team Deluxe con pompa. Il presente dispositivo ha lo scopo di alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da malattie sul corpo umano. Il dispositivo deve essere gonfiato con aria prima dell'uso e al proprio interno non possono essere introdotti liquidi o altre sostanze. Cuscino gonfiabile con forma ad anello per dare conforto e sostegno a qualsiasi superficie di appoggio; utile soprattutto dopo un intervento chirurgico o in determinate condizioni mediche come le emorroidi e altre simili. Costruito in gomma resistente a lunga durata.

Pressione massima: 130 kg. Dimensione ciambella sgonfia: 43 cm. Dimensione ciambella gonfia: 45 cm. Peso ciambella: 550 g. Spessore ciambella: 1,4 mm. Rubinetto dell'aria: 0,6 cm x 0,6 cm x 4,10 cm. Pompa per ciambella: lunghezza 27 cm, diametro bulbo 5 cm. Componenti Ciambella: gomma naturale. Pompa per ciambella: gomma. Rubinetto dell'aria: rame. Modalità d'uso Prima di procedere all'utilizzo del dispositivo, eseguire una pulizia accurata della superficie esterna dello stesso con acqua tiepida e sapone neutro. Non utilizzare per la detersione né mezzi abrasivi né detergenti diversi da quelli indicati che potrebbero danneggiare il dispositivo. Asciugare prestando particolare attenzione alla valvola. Ripetere tale operazione secondo necessità. Procedere ad un moderato gonfiaggio. Eccessivi rigonfiamenti potrebbero causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili. Appoggiare il dispositivo prima dell'uso su superfici piane. A fine utilizzo eseguire un'accurata pulizia e conservare il dispositivo sgonfio, al riparo da luce e polvere. A fine uso conviene svuotarlo dal contenuto d'aria. In caso di lunghi periodi di inutilizzo si consiglia di lavarlo accuratamente eseguendo conseguentemente una perfetta asciugatura e poi riporlo sgonfio in idoneo ambiente. Avvertenze Utilizzare solo su cute integra e secondo le indicazioni riportate sul presente foglietto illustrativo. Ogni uso diverso è da considerarsi improprio. Conservazione Conservare il dispositivo a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore e polvere. Smaltire secondo la normativa vigente. Formato Ciambella diametro 43 cm, con pompetta. Cod. FAR 035