

COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE GEL 10 ML

Marchio: COLLIRIO ALFA
Codice Min.: 981046055
Link: [clicca qui per acquistare](#)



COLLIRIO ALFA LUBRIFICANTE E UMETTANTE
Descrizione Dispositivo Medico CE. Sterile. Gel oftalmico lubrificante e umettante contenente lo 0,2% di Carbomer. Utile per alleviare i sintomi della secchezza e dell'irritazione oculare causati da un ridotto flusso lacrimale. Grazie alle proprietà muco-adesive del Carbomer, riduce i sintomi derivati dall'instabilità del

film lacrimale. Indicato per le persone che manifestano sensazione di secchezza, affaticamento o fastidio agli occhi provocati da fenomeni irritativi (polvere, aria condizionata, vento, fumo, uso prolungato di videoterminali). Gel trasparente viscoso che fuoriesce dal contenitore sotto forma di gocce. Modalità d'uso Lavarsi le mani. Svitare il tappo del tubo. Inclinare il capo all'indietro e guardare verso l'alto. Abbassare delicatamente con le dita di una mano la palpebra inferiore dell'occhio per formare una tasca. Tenere con l'altra mano il tubo in posizione verticale per favorire la formazione di una piccola goccia. Instillare la goccia in un occhio senza toccarlo con l'estremità del tubo e pulire delicatamente l'eccesso di prodotto dal contorno dell'occhio. Tenere chiuso l'occhio per 1-2 minuti. Avvitare il tappo del tubo, prestando attenzione a non far toccare il tubo con qualsiasi altra superficie (compresi occhi o dita). Instillare una goccia nel sacco congiuntivale 3-4 volte al dì, ovvero secondo necessità. Componenti Carbomer 0,2%, Cetrimide, Sorbitolo, Idrossido di Sodio, Sodio Edetato, Acqua distillata. Avvertenze Il prodotto è solo per uso oftalmico. L'uso di Collirio Alfa Lubrificante e Umettante Gel è controindicato nel caso di allergia a uno qualsiasi dei componenti. Il prodotto non deve essere utilizzato con le lenti a contatto. Dopo aver instillato Collirio Alfa Lubrificante e Umettante Gel attendere almeno 30 minuti prima di applicare di nuovo le lenti a contatto. Qualora si necessiti di concomitanti trattamenti oculari, attendere circa 10 minuti e comunque lasciare Collirio Alfa Lubrificante e Umettante Gel come ultimo trattamento da utilizzare. Dopo l'instillazione del prodotto si potrebbe avvertire un bruciore temporaneo, secrezione palpebrale e visione offuscata. Assicurarsi pertanto di vedere chiaramente prima di guidare, usare macchinari o fare altri lavori che potrebbero essere pericolosi se non si è in grado di vedere correttamente. Il periodo di validità è riferito al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare se il contenitore appare danneggiato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 30°C. Validità dopo la prima apertura: 28 giorni. Formato Tubo da 10 g. Cod. 48400099