

COLLIRO ALFA LUBRIFICANTE/IDRATANTE 10 ML

Marchio: COLLIRIO ALFA
Codice Min.: 980810941
Link: [clicca qui per acquistare](#)



COLLIRO ALFA LUBRIFICANTE E IDRATANTE Descrizione Dispositivo Medico CE. Sterile. Soluzione oftalmica a base di Acido ialuronico ad alto peso molecolare, ottenuto per sintesi biotecnologica. L'Acido ialuronico è una sostanza che dà origine a soluzioni mucomimetiche con elevate proprietà lubrificanti; la viscosità di suddette soluzioni è tale da consentire un elevato effetto idratante e una stabilizzazione del film lacrimale. Le qualità umettanti e protettive dell'Acido ialuronico conferiscono un sollievo prolungato agli occhi nel caso di irritazione, bruciore e sensazione di corpo estraneo dovuti a fattori ambientali (vento, sole, fumo, aria secca), stress visivo (eccessiva luce o uso prolungato di computer) o fattori meccanici (uso di lenti a contatto, dopo chirurgia oculare). Modalità d'uso Una goccia nell'occhio una o più volte al giorno, a seconda delle necessità. Componenti Acido ialuronico sale sodico (0,2% p/v), Sodio Cloruro,

Sodio Fosfato monobasico monoidrato, Sodio Fosfato bibasico dodecaidrato, Sodio Edetato, Benzalconio Cloruro, Acqua per preparazioni iniettabili. Avvertenze Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno. Non utilizzare se il flacone risulta danneggiato. Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione. Evitare di toccare l'occhio con la punta del flacone. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Dopo la somministrazione, può verificarsi un temporaneo offuscamento visivo che comunque scompare entro pochi minuti: è conveniente attendere la scomparsa dell'offuscamento prima di intraprendere qualunque attività che richieda chiarezza visiva (guida di autovetture, impiego di macchinari, ecc.). Lasciar trascorrere 10-15 minuti tra l'instillazione di Collirio Alfa Lubrificante e Idratante e l'eventuale instillazione di farmaci per uso oftalmico esterno. Non usare il prodotto mentre si indossano lenti a contatto. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. Conservazione Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Validità dopo la prima apertura: 1 mese. Formato Flacone da 10 ml. Cod. 48400095