

CORNEIAL MED GOCCE OCULARI 10 ML

Marchio: BIODUE
Codice Min.: 982145688
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Corneial MED Descrizione Corneial MED è una soluzione oftalmica lubrificante, protettiva e idratante. Il suo uso dona una pronta sensazione di sollievo, freschezza e benessere. Le gocce oculari Corneial MED sono indicate per alleviare l'arrossamento, l'irritazione, il prurito e la secchezza oculare dovute a: condizionamento o riscaldamento dell'aria, soggiorno in presenza di fumo o di altri tipi di inquinamento dell'aria, esposizione prolungata al vento o ai raggi solari, cloro, salsedine, attività sportive in genere, intenso impegno per lo studio o il lavoro, uso di lenti a contatto, corpi estranei, uso eccessivo degli schermi video e in generale stanchezza. Corneial MED è indicato anche in caso di secchezza oculare dovuti anche a blefarite, traumi e nel decorso post-operatorio di interventi chirurgici della super cie oculare (cataratta, refrattiva, IVT, ecc). Il prodotto, contiene acido ialuronico cross linkato e PHMB. L'acido ialuronico, polimero naturale

presente nel film lacrimale e nell'occhio umano, è in grado di alleviare l'irritazione della super cie oculare mantenendola idratata in maniera ottimale. La formula cross linkata migliora le proprietà dell'acido ialuronico ottenendo una maggiore biodisponibilità e resistenza alla degradazione. Contiene anche PoliEsaMetilenBiguanide (PHMB), sostanza che contribuisce a inibire la proliferazione microbica. Modalità d'uso Instillare una o due gocce per occhio esercitando una leggera pressione sul flacone. È possibile utilizzare il prodotto tutti i giorni, anche più volte al giorno, secondo necessità, anche indossando le lenti a contatto. L'uso di Corneial MED è semplice, sicuro e privo di qualunque effetto collaterale, è adatto a tutti, compresi bambini ed anziani. Componenti PoliEsaMetilenBiguanide: 0,0003%; sodio ialuronato cross-linkato 0,2%; ipromellosa 0,2%; EDTA bisodico, tampone borato, sodio cloruro, eccipienti e acqua depurata q.b. a 100%. Avvertenze Il prodotto è solo per uso esterno. Non usare se il sigillo non è integro. Non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna super ficie, compresa quella oculare, per non inquinare il prodotto. Chiudere bene il flacone dopo l'uso. Non utilizzare in caso di ipersensibilità specifici verso qualche componente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Quando siano prescritti medicinali per uso oftalmico, farsi consigliare dallo specialista sull'uso contemporaneo di Corneial MED. Non disperdere il flaconcino nell'ambiente, dopo l'uso. In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista. Non esiste alcuna controindicazione accertata, se non vi sono allergie specifiche per qualche componente. Conservazione Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque al di sotto di 30°C. Non usare dopo la scadenza indicata sulla confezione. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 90 giorni. Formato Flacone da 10 ml