

CURE TAPE AZZURRO 5X500 CM

Marchio: Aneid Italia
Codice Min.: 910829377
Link: [clicca qui per acquistare](#)



CURE TAPE Il Cure Tape è ipoallergenico in cotone di alta qualità, European Class 1 medical Device n° NL/CAC01/04-07434 e registrato sotto il n° 314882 di conformità CEE e certificato di analisi. Il Cure Tape permette alla pelle di respirare, evitando il sudore e l'irritazione della pelle. La sua elasticità permette di aderire a qualunque parte del corpo senza limitare l'ampiezza del movimento. Può essere usato per ridurre tensioni cutanee e disagi muscoloscheletrici del corpo, facilitando l'autoguarigione. La sua corretta applicazione stimola i processi naturali di guarigione tramite il sistema biologico naturale. Dopo l'applicazione la pelle formerà delle "grinze", sollevandosi. Questo movimento migliora il flusso del sangue e dei fluidi linfatici sottostanti, aiutando il loro normale

funzionamento. Una corretta applicazione del Cure Tape permette anche di: - sostenere i muscoli. - diminuire la congestione del sistema linfatico. - attivare il sistema analgesico endogeno. - correggere problemi articolari. - migliorare la struttura della pelle. Consigli prima dell'uso -L'uso di questo prodotto può causare un' irritazione della pelle nelle persone iperallergiche. Se si manifestano segni come prurito o rossore sospendere il suo uso, detergere bene la zona irritata con acqua tiepida saponata e consultare il proprio terapeuta. - Caso il soggetto sia allergico agli adesivi si raccomanda di testare il tape prima dell'uso. - Prima dell'applicazione lavare la pelle con acqua e sapone. - La temperatura corporea aumenta l'aderenza, quindi il nastro deve essere applicato prima di compiere attività fisiche o docce. - L'applicazione deve essere fatta in modo leggero senza costrizione. Consigli per l'uso corretto del Cure Tape - L'applicazione del nastro non dovrà ostacolare il movimento articolare o muscolare. - Misurare l'area interessata, tenendo la parte del corpo stirata e tagliando la lunghezza necessaria. - Il nastro deve essere applicato appoggiandolo sulla pelle senza pressione poiché in tal modo facilita la circolazione vascolare e il drenaggio linfatico. - Mantenere il nastro sulla pelle anche durante la doccia e asciugarlo tamponandolo. Consigli per rimuovere il Cure Tape - Per rimuovere il nastro toglierlo delicatamente senza strapparlo. - La rimozione del nastro deve essere fatta nel senso dei peli. - Arrotolare il nastro mentre si stacca usando la base della mano e allontanando la pelle delicatamente dal nastro con l'aiuto delle dita. È consigliabile rimuovere il nastro sotto la doccia. - È consigliabile rimuovere il nastro sotto la doccia. In alternativa può essere rimosso imbevendolo in acqua e sapone, lozione per le mani oppure si può utilizzare dell'olio per facilitare l'operazione. Contenuto - Il Cure Tape ha una lunghezza di 5 metri. - La fibra elastica è sulla lunghezza del nastro e produce un'elasticità monodirezionale. - L'adesivo è 100% acrilico ipoallergenico e ha un'elasticità del 40% simile a quella della pelle. - Non contiene alcol. - Non contiene farmaci o medicazioni di alcun tipo. Il Cure Tape è disponibile nei seguenti colori:
DescrizioneMisura CodiceCodice Paraf.DescrizioneMisuraCodiceCodice Paraf. Cure Tape Beige5 cm x

5 m CT-N 910829415 Cure Tape Verde 5 cm x 5 m CT-V 925901163 Cure Tape Rosa 5 cm x 5 m CT-R
910829441 Cure Tape Rosso 5cm x 5m CT-RS 926201245 Cure Tape Azzurro 5 cm x 5 m CT-B
910829377 Cure Tape Beige 2,5 cm 2,5 cm x 5 m CT-N-2,5 922492323 Cure Tape Nero 5 cm x 5 m
CT-BL 920062445 Cure Tape Beige 7,5 cm 7,5 cm x 5 m CT-N-7,5 910829427 Cure Tape Arancione 5
cm x 5 m CT-A 920062433 Cure Tape Beige 31,5 m 5 cm x 31,5 m CT-N-31,5 922492335 Cure Tape
Bianco 5 cm x 5 m CT-W 924214366 Cure Tape Azzurro 31,5 m 5 cm x 31,5 m CT-B-31,5 926860216
Cure Tape Giallo 5 cm x 5 m CT-G 924214392 Cure Tape Nero 31,5 m 5 cm x 31,5 m CT-BL-31,5
926860228 Avvertenze - Evitare di conservare il Cure Tape vicino a fonti di calore o sotto la luce diretta
del sole. - Tenerlo lontano dalla portata dei bambini. - Questo prodotto è per l'uso di terapisti
professionisti. - Leggere attentamente le istruzioni all'interno della scatola.
Cod.CURETAPEB/CURETAPEN/CURETAPE75/CURETAPER/CURETAPEA/CURETAPEBL/CURETA
PE25/CURETA PE315/CURETAPEW/CURETAPEG/CURE TAPE 31,/CURE TAPE
31,/CURETAPERS/CURETAPEV