

## DEBROX GOCCE AURICOLARI 15 ML

**Marchio:** DEBROX  
**Codice Min.:** 908297310  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



Debrox Dispositivo Medico CE, classe I. Gocce auricolari predate che liberano l'orecchio dal tappo di cerume e ne prevengono la formazione. Modalità d'uso Inclinare leggermente la testa e instillare 3-6 gocce nel condotto uditivo. Fare in modo che le gocce rimangano alcuni minuti nell'orecchio, mantenendo la testa inclinata o inserendo un batuffolo di cotone. Rimuovere delicatamente il liquido fuoriuscito dal canale auricolare. In caso di tappo di cerume, effettuare un risciacquo in profondità con acqua tiepida al termine del trattamento per rimuovere i residui di cerume, avendo cura di non indirizzare getti d'acqua direttamente sul timpano. - Per rimuovere il tappo di cerume: instillare 3-6 gocce per ciascun orecchio e ripetere il trattamento 2 volte al giorno per 3-

6 giorni. - Per prevenire la formazione: instillare alcune gocce una volta alla settimana. Avvertenze Uso esterno. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. In presenza di accertate o sospette lesioni a carico del condotto uditivo esterno e/o della membrana timpanica è consigliabile consultare il medico specialista ORL. Non usare in presenza di protesi uditive. Consultare il medico in caso si verificano bruciori persistenti o in caso di peggioramento della sintomatologia provocata dal tappo di cerume. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservazione Non conservare al di sopra dei 25°C. Tenere il flacone ben chiuso ed evitare l'esposizione al calore eccessivo o alla luce diretta. Richiudere il flacone dopo l'uso e usare entro 30 giorni dalla prima apertura. Componenti Glycerin; urea peroxide; aqua; propylene glycol; sodium lauroyl sarcosinate; citric acid. Formato Flacone da 15 ml, con contagocce a goccia predata.