

## DEBROX SPRAY NASO ORECCHIE B/A 125ML

**Marchio:** DEBROX  
**Codice Min.:** 981438056  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DEBROX SPRAY ISOTONICO PER NASO E ORECCHIE** Descrizione Questo spray nebulizzato è una soluzione isotonica che contiene gli oligo-elementi naturali dell'acqua di mare, particolarmente adatto per una delicata detersione del naso e delle orecchie. Usato quotidianamente, aiuta a liberare con delicatezza le fosse nasali, e, grazie allo speciale beccuccio erogatore, è inoltre appositamente studiato per favorire la rimozione del cerume in eccesso, aiutando a prevenire la formazione del "tappo". Contiene 2 erogatori: quello con il cono protettivo è adatto all'uso auricolare, quello senza cono protettivo è adatto all'uso nasale. Per il naso: utilizzabile in qualsiasi posizione, questo spray nebulizzato ben si presta per una migliore igiene del naso del bambino, grazie anche all'erogatore appositamente studiato per garantire un'igiene nasale senza pericoli. Lo spray è indicato per

l'igiene quotidiana del naso di bambini e neonati a partire da due mesi in quanto assicura una corretta pulizia del naso nei bambini che non sono ancora in grado di soffiare correttamente. Inoltre favorisce nel bambino una maggiore pervietà delle narici aiutando la regolarizzazione della respirazione e conseguentemente assicura un sonno tranquillo e facilita la poppata nei lattanti. Per l'orecchio: questa soluzione isotonica di acqua di mare, grazie all'erogatore dotato di un sistema di microdiffusione a pressione controllata, che garantisce un'erogazione costante, favorisce la detersione delicata del canale auricolare ed il mantenimento di una corretta pulizia nel rispetto dell'equilibrio fisiologico, ed è particolarmente indicato a chi pratica sport acquatici e nei casi di elevata produzione di cerume. Rispetta lo strato di ozono. Utilizzo garantito fino all'ultima goccia. Modalità d'uso Per l'uso nasale: togliere il cappuccio protettivo allo spray. Posizionare delicatamente l'erogatore adatto (senza cono protettivo) nella narice tenendo la testa inclinata su un fianco. Esercitare una breve pressione sull'erogatore, attendere qualche secondo ed asciugare il liquido in eccesso. Lasciare agire la soluzione qualche istante prima di soffiare il naso. Pulire bene l'erogatore con acqua calda dopo l'utilizzo. Per uso auricolare: posizionare delicatamente l'erogatore adatto (con cono protettivo) inclinare la testa da un lato, introdurre l'imboccatura dell'erogatore all'ingresso della cavità dell'orecchio e premere con leggere erogazioni fino a farne uscire la quantità desiderata. Attendere qualche secondo per fare agire la soluzione, sollevare la testa e asciugare il liquido in eccesso. Pulire bene l'erogatore con acqua calda dopo l'utilizzo. Componenti Maris aqua, acqua. Avvertenze Per l'applicazione auricolare non usare sotto i trenta mesi. Per l'applicazione nasale non utilizzare sotto i due mesi. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Non fumare. Proteggere dai raggi solari. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente. In caso di irritazione consultare un medico. Rispettare la data di scadenza riportata sotto la bombola. Rispettare le istruzioni per l'uso.

Conservazione Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione e proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C. Validità a confezionamento integro: 30 mesi. Formato Flacone spray da 125 ml