

DENTILINE PASTA 2 G + LIQUIDO 1 G

Marchio: -
Codice Min.: 902029038
Link: [clicca qui per acquistare](#)



DENTILINE Cemento in pasta e liquido per l'otturazione di urgenza di cavità dentarie formatesi a causa di: un'improvvisa perdita di un'otturazione, fratture di un dente, carie anche dolorose. Composizione Cemento di otturazione in pasta: allume potassico, solfato di alluminio, fosfato di alluminio, solfato di calcio, polvere di ossido di zinco, paraffina, mentolo, eugenolo. Liquido di indurimento del cemento: eugenolo. Indicazioni Il cemento si applica per otturare una cavità dentale, formatesi o per una carie o per la perdita di un'otturazione, o per ricostruire

temporaneamente un dente fratturato. Il cemento collocato nella cavità da chiudere indurisce rapidamente sia per contatto con il liquido contenuto nella fialetta, sia per contatto con la saliva, non si disgrega, resiste alla masticazione, si applica e si toglie con molta facilità. Il liquido deve essere applicato nella cavità prima di chiuderla con il cemento di otturazione temporanea in pasta: esso favorisce l'indurimento della pasta stessa e la sua perfetta adesione alle pareti del dente, impedendo così l'eventuale ingresso di cibo e/o di altri residui nella cavità, che potrebbero causare dolore. Controindicazioni L'uso è controindicato nei pazienti che presentano un'ipersensibilità accertata verso il prodotto. Avvertenze Non ingerire la soluzione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Modalità d'uso A) Prima di usare il prodotto è consigliato lavarsi le mani e detergere la bocca mediante sciacqui, preferibilmente, con collutorio. B) Prelevare un poco di cotone idrofilo contenuto nella confezione e arrotolarlo in modo da ottenere una pallina. C) Prendere la pallina di cotone con le pinzette contenute nella confezione e bagnarla con il liquido. D) Inserire nella cavità del dente la pallina di cotone bagnata con il liquido, avendo cura di lasciare lo spazio per la pasta. E) Staccare una piccola quantità di pasta, ammorbidirla facendola rotolare tra l'indice e il pollice dandole una forma adatta alla cavità del dente da trattare. F) Collocare la pasta otturante nella cavità del dente dopo avere, eventualmente, asportato la pallina di cotone imbevuto. G) Adattare la pasta alla cavità del dente mediante la spatola contenuta nella confezione. H) Terminato l'uso, richiudere la fialetta del liquido e riavvolgere la pasta otturante nel proprio cellophane. I) Se necessario, ripetere il trattamento. Avvertenze Dopo aver effettuato il trattamento d'urgenza, consultare il dentista appena possibile. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservazione - Non utilizzare dopo la data di scadenza apposta sulla confezione. - Conservare la confezione ben chiusa, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Formato La confezione contiene: - 1 fialetta da 1 g di soluzione; - 1 barretta di pasta da 2 g; - 1 rullo di cotone; - 1 spatola; - 1 pinzetta. Il prodotto deve essere utilizzato secondo le istruzioni d'uso.