

## DIFESAN 7 COMPRESSE VAGINALI

**Marchio:** Progine Farmaceutici  
**Codice Min.:** 905345334  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**DIFESAN Descrizione** Dispositivo medico di classe 2. Compresse vaginali con sistema di applicazione. Prodotto indicato: - Come trattamento coadiuvante utile per la prevenzione del parto pretermine in presenza di cervicometria ridotta o non corrispondente al periodo gestazionale. - Come coadiuvante nella prevenzione dell'aborto spontaneo e del parto pretermine. - Come coadiuvante nella prevenzione contro l'aumentato rischio di aborto legato alle procedure invasive quali Amniocentesi o Villocentesi. - Come coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento dell'infertilità femminile. Modalità d'uso Estrarre un applicatore vaginale dal proprio involucro di confezionamento prestando particolare attenzione.

Introdurre l'applicatore in vagina, in profondità e rilasciare la compressa in

esso contenuta premendo delicatamente lo stantuffo. Componenti Lattoferrina (300 mg), agenti di compressione lubrificanti e disgreganti. Avvertenze Il prodotto è per uso vaginale. La compressa, sciogliendosi, potrebbe causare perdite color rosa pallido, dovute al colore naturale della lattoferrina, rosa salmone. Non ingerire. Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. Può contenere lattosio. In gravidanza accertata o presunta ed in caso di terapie farmacologiche locali concomitanti l'impiego della compressa vaginale deve avvenire solamente dietro il consiglio del proprio medico curante o del farmacista. Il prodotto non è destinato all'uso pediatrico. Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista. Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra. Utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni d'uso. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Formato 7 compresse vaginali Peo netto 5,6 g