

## DOLOMIR OTO GOCCE AURICOLARI FLACONE 15 ML

**Marchio:** DOLOMIR  
**Codice Min.:** 932088343  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



DOLOMIR OTO Descrizione Coadiuvante specifico per la detersione del condotto uditivo, la rimozione delicata del tappo di cerume e la prevenzione della sua formazione grazie alle proprietà dermo-protettive e lubrificanti dell'estratto oleoso di Mirra combinato con l'olio d'oliva. Indicato per l'utilizzo nei bambini, nei soggetti portatori di protesi acustiche, praticanti sport acquatici e soggetti con eccessiva secrezione del canale auricolare. Dispositivo Medico. Uso esterno. Modalità d'uso Inclinare lateralmente la testa ed instillare 2-3 gocce nel condotto uditivo di ciascun orecchio. Mantenere la testa inclinata per alcuni minuti permettendo così al prodotto di agire; è possibile applicare un batuffolo di cotone per aumentare il tempo di permanenza delle gocce nel condotto. Componenti Olio d'oliva, mirra estratto oleoso, DL-alfa tocoferolo

(antiossidante). Avvertenze Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Non ingerire. Richiudere il flacone dopo l'uso. Risciacquare immediatamente con abbondante acqua in caso di contatto con gli occhi. In presenza di accertate o sospette lesioni a carico del condotto uditivo esterno e/o della membrana timpanica è consigliabile consultare il medico specialista ORL. Consultare il medico in caso si verificano bruciori persistenti o un peggioramento della sintomatologia riconducibile al tappo di cerume. Non superare le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In presenza di protesi uditive, rimuovere i dispositivi prima di procedere con l'instillazione del prodotto. Conservazione Conservare a temperatura ambiente (15-25°C). Validità a confezione integra: 24 mesi. Formato Flacone da 15 ml Cod. JP-DOLG16