

EFFERDENT VASCHETTA PORTAPROTESI

Marchio: EFFERDENT
Codice Min.: 8004283508057
Link: [clicca qui per acquistare](#)



efferdent VASCHETTA PORTAPROTESI Vaschetta per l'igiene quotidiana di dentiere, ponti mobili e apparecchi ortodontici. L'igiene della dentiera è una necessità quotidiana per la salute della bocca e per una lunga conservazione della dentiera. È stata appositamente studiata per consentire un'approfondita pulizia della dentiera in tutte le sue parti grazie alla sua griglia mobile. È possibile utilizzare la vaschetta anche per la pulizia di ponti mobili e apparecchi ortodontici. Modalità d'uso 1)Togliere il filtro mobile, riempire la vaschetta con acqua tiepida o leggermente calda e aggiungere 1 compressa 2)Inserire la dentiera sul filtro mobile e immergere il tutto nella soluzione igienizzante. 3)Lasciare la dentiera in soluzione per 15 minuti (o se preferite tutta la notte). 4)Rimuovere il filtro mobile della vaschetta e sciacquare con cura la dentiera sotto acqua corrente. Cod. 50805