

EKEEP B1 POSTURAL BRA REGGISENO POSTURALE 4

Marchio: EKEEP
Codice Min.: 975997887
Link: [clicca qui per acquistare](#)



EKEEP B1 POSTURAL BRA Descrizione Reggiseno posturale indicato nei casi di: -sindrome da mal allineamento posturale; -sindrome posturale dolorosa; -dorso curvo da ipercifosi; -correzione posturale durante l'attività sportiva e quotidiana. Tessuto ultrasottile aerato, leggero, traspirante, fresco, Wash&Wear, senza ferretti, chiusura anteriore a gancetti. Con sistema di tensionamento a 4 punti di ancoraggio e 2 tiranti ad incrocio dorsale. Con fascia inferiore in tessuto elastico confortevole. Composizione Corpo maglia: 75% poliammide, 25% elastan. Fasce: 60% poliammide, 30% poliestere, 10% elastan. Modalità d'uso Indossare il prodotto come un normale reggiseno utilizzando la chiusura anteriore a gancetti. Tendere i tiranti regolabili sino ad ottenere l'effetto di

retropulsione desiderato. Fissare le estremità dei tiranti nelle apposite aree di velour. Lavaggio: lavare a mano in acqua a 30°C o in lavatrice nell'apposito sacchetto, con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente. Non stirare. Informazioni sulle taglie 1. Prendere la misura della circonferenza sottoseno. 2. Prendere la misura della circonferenza del seno. Le due misure devono essere riferite alla stessa riga. · Misurazione A - Circonferenza sottoseno (cm)B - Circonferenza seno (cm) TagliaBCDE 168-7284-8686-8888-9090-92 273-7789-9191-9393-9595-97 378-8294-9696-9898-100100-102 483-8799-101101-103103-105105-107 588-92104-106106-108108-110110-112 693-97109-111111-113113-115115-117 798-102114-116116-118118-120- 8103-107119-121121-123-- 9108-112124-126--- 3. Dall'incrocio delle due misurazioni precedentemente prese, determinare la corretta taglia. · Tabella taglie MisurazioneTaglie eKeep B1 1B---1 2B1C--2 3B2C1D-3 4B3C2D1E4 5B4C3D2E5 6B5C4D3E6 7B6C5D4E7 8B7C6D5E8 9B8C7D6E9 Formato 1 reggiseno posturale. Disponibile in 9 taglie. Cod.5K2650D00BA0