

## EMORTROFINE H 30 ML

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 944873759  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Emortrofine H** Descrizione Dispositivo medico di classe IIa. Gel proctologico. Trattamento efficace di disturbi anorettali quali emorroidi interne ed esterne, ragadi anali, proctiti e prurito. Con Tri-Solve P (tecnologia filmante brevettata). Formula priva di cortisone. Adatto in caso di tendenza a recidive. Modalità d'uso Per applicazione perianale e/o anorettale. Applicare su pelle pulita. Applicare due o tre

volte al giorno, preferibilmente dopo ogni evacuazione. Continuare il trattamento per 1-2 settimane fino alla scomparsa dei sintomi. Dopo l'applicazione è consigliabile evitare l'evacuazione per almeno 20-30 minuti, così da non rimuovere il prodotto prima del dovuto. Componenti Acido ialuronico, Tri-Solve P (trealosio, ceramide NS, lecitina idrogenata), metilsulfonilmetano, glicerina, idrossietil-cellulosa, bisabololo, acqua, sorbitolo, glicole pentilenico, glicole propilenico, EDTA bisodico, copolimero calcio/sodio, triclosan, symbiol (1,2- hexanediol, tropolone, caprylyl glycol), idrossido di sodio. Avvertenze Il dispositivo non è soggetto a speciali precauzioni d'uso. Si raccomanda tuttavia di: - tenere fuori dalla portata dei bambini; - non eccedere la dose d'uso raccomandata; - non utilizzare dopo la data di scadenza; la data di scadenza si riferisce al prodotto intatto e propriamente conservato; - in caso di reazioni avverse, sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico per stabilire la terapia più appropriata; - non sono emersi dati da segnalare in merito ad interazione con farmaci normalmente utilizzati nella terapia di emorroidi o ragadi anali; - non utilizzare il prodotto per più di 30 giorni consecutivi. In caso di utilizzo in gravidanza o allattamento, consultare il proprio medico. L'osservanza delle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo riduce il rischio di effetti collaterali. È importante informare il proprio medico o farmacista riguardo ad alcun effetto collaterale non menzionato nel foglietto illustrativo. Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore localizzate, dai raggi solari ed evitare il contatto con l'acqua. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. Formato Tubo da 30 ml con cannula multiuso Cod. 29219