

ENTEROCLISMA PIC FULLWASH 2 LITRI

Marchio: PIC
Codice Min.: 8003670020059
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Enteroclysis Modalità d'uso: aprire la custodia. Avvitare il tubicino di gomma. Chiudere il rubinetto in fondo al tubicino e avvitarci una delle due cannule (dritta per uso anale e ricurva per uso vaginale). Riempire al borsa con la soluzione desiderata. Appendere l'enteroclysis ad un attacco abbastanza alto per far uscire il liquido con la pressione desiderata (più alto - più pressione; meno alto - meno pressione). Per far uscire il liquido è necessario aprire il rubinetto. Dopo l'uso lavare accuratamente il contenitore e gli accessori. Caratteristiche: sistema per lavaggi intestinali mediante irrigatore, la sacca di plastica o il contenitore rigido hanno una capacità di 2 litri, con scala graduata, cannula anale per clisteri e cannula vaginale d'irrigazione. Disponibili in tre diverse versioni con accessori

anche a parte. Cod. 00002005000000 / 00002010000000 / 03050011000000