


EPITACT GINOCCHIERA ROTULEA 3

Marchio: EPITACT
Codice Min.: 974035507
Link: [clicca qui per acquistare](#)

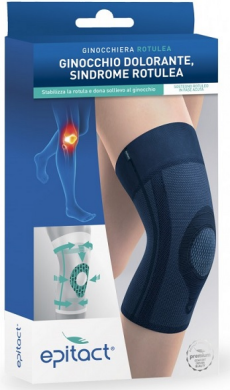

EPITACT GINOCCHIERA ROTULEA Descrizione Si raccomanda di indossare la ginocchiera rotulea EPITACT per la sindrome dolorosa ed infiammatoria del ginocchio ed in particolare per le sindromi che interessano la rotula (traumi, lussazioni, distorsioni...). Indicata per prevenire episodi di instabilità della rotula. La ginocchiera EPITACT integra il tirante rotuleo EPITHELIUMFLEX che si posiziona intorno alla rotula per limitarne le deviazioni laterali. La maglia elastica 3D esercita una compressione che migliora la percezione sensoriale dell'articolazione (propriocezione) e contribuisce a stabilizzarla. Le stecche laterali flessibili rafforzano il sostegno del ginocchio. Grazie alla benda elastica siliconata situata sulla coscia, la ginocchiera non scivola ed ha una tenuta eccellente. Il cuscinetto brevettato posizionato dietro al ginocchio (cavità poplitea) evita fastidi ed irritazioni. La rotula è protetta dalle

compressioni grazie alla zona realizzata in tessuto anticomplessivo. La maglia microperforata permette di evacuare il sudore per offrire il massimo comfort. Disponibile in 5 misure (a seconda della circonferenza del ginocchio): - 1: 33-35 cm; - 2: 36-38 cm; - 3: 39-41 cm; - 4: 42-43 cm; - 5: 44-45 cm. Consigli: per favorire la ripresa oppure in stati di dolore cronico ripetuto consigliare Ginocchiera gonartrosi. Agli sportivi, invece, che riprendono l'attività si raccomanda di indossare Ginocchiera Sport, un altro prodotto della gamma EPITACT che rende più sicuro il ginocchio fragile. Controindicazioni: non utilizzare in caso di arterite, importante stato varicoso, postumi di flebite o edema (linfatico/venoso) della gamba e/o della coscia, per non ostacolare la circolazione. Non utilizzare su lesioni cutanee. Componenti 67,8% tessuto (poliammide, elastane, poliestere), 22,7% alluminio, 9,5% silicone. Formato 1 ginocchiera.