

## EPITACT ORTESI POLLICE MANO NOTTE DESTRA L

**Marchio:** Epitact  
**Codice Min.:** 3660396007846  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



epitact ORTESI RIGIDA RIZOARTROSI NOTTE THERMOFORMABILE  
Descrizione L'ortesi correttiva notte aiuta ad alleviare i dolori articolari alla base del pollice e contribuisce a limitare l'evoluzione della rizartrrosi. Mantiene il pollice in posizione di riposo aprendo la commessura fra l'indice e il pollice. L'allineamento delle ossa limita le sollecitazioni a carico dell'articolazione trapezio-metacarpale e aiuta ad alleviare il dolore. Realizzata su misura in quanto termoformabile. Lavabile in lavatrice a 40°C. Non usare smacchiatori come, per esempio, acetone, solvente. Lasciare asciugare naturalmente. Non stirare. Non esporre al calore (>50 °C). Modalità d'uso L'ortesi rigida diventa morbida una volta immersa nell'acqua calda. Dal momento in cui la indosserete prenderà la forma della vostra mano posizionandola in modo naturale con il

pollice a riposo. Si indurisce e ritorna rigida in pochi minuti. Attenersi alle istruzioni di termoformatura fornite. L'ortesi può essere termoformata più volte se necessario. Infilare la mano nell'ortesi facendo scorrere il pollice nell'apposita sezione. Inserire la cinghia con chiusura a strappo nella fibbia alla base del pollice, stringere leggermente l'ortesi attorno al polso. Componenti 53% plastica termoformabile, 47% poliammide/elastan. Avvertenze In caso di reazione avversa, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e informare la società Millet Innovation. Non applicare su lesioni non protette. In caso di edema grave: tenere sotto controllo la mano durante l'uso. Rimuovere il dispositivo se il fissaggio risulta troppo stretto e ostacola la circolazione del sangue. In caso di dubbi, chiedere consiglio al medico o al farmacista. Non utilizzare in prossimità di fiamme o oggetti incandescenti. Formato Confezione contenente un articolo. Mano sinistra, taglia S Mano sinistra, taglia M Mano sinistra, taglia L Mano destra, taglia S Mano destra, taglia M Mano destra, taglia L