

## ESENTA RIMUOVI ADESIVO SPRAY 50 ML

**Marchio:** CONVATEC ITALIA  
**Codice Min.:** 982941662  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



**Spray Protettivo ESENTA** Descrizione Spray ipoallergenico al silicone per la rimozione atraumatica e delicata di adesivi medici o dispositivi aderenti: dispositivi per stomia, cerotti e residui di adesivo. Lo spray contiene una miscela di fluidi siliconici che, una volta applicata, interrompe il legame tra adesivo e cute, consentendo una rimozione più facile dell'adesivo. La formulazione in silicone ha una viscosità molto bassa, si applica facilmente ed evapora rapidamente senza lasciare residui. Il contenuto del prodotto è trasparente ed incolore. Lo spray è privo di soluzione alcolica. Finalizzato a facilitare la rimozione atraumatica di adesivi medici riducendo i traumi da strappo e proteggendo la pelle dall'irritazione. Una volta utilizzato nell'area interessata, si asciuga in pochi secondi e non lascia residui. Il prodotto idrata la cute lasciandola morbida, setosa e pronta per l'adesione di un nuovo dispositivo o di una nuova medicazione. A contatto con la cute non brucia neppure in presenza di

irritazione. Al momento dell'applicazione si potrebbe percepire un leggera sensazione di freschezza nella zona interessata. Lo spray è ipoallergenico e non unge. Si può applicare da qualsiasi angolazione. Modalità d'uso 1. Spruzzare attorno al bordo dell'adesivo e attendere alcuni secondi. 2. Staccare delicatamente l'adesivo dalla cute usando, se necessario, altro spray per facilitare la rimozione. Avvertenze - Evitare l'uso diretto sul letto della lesione. - Evitare l'uso su parti delicate e sensibili della pelle (occhi, bocca, orecchie, naso, vagina). - In caso di dubbio, testare il prodotto su una piccola area rima dell'uso. - In presenza di irritazione cutanea, interrompere l'uso e consultare un operatore sanitario. - Evitare l'inalazione. - Esclusivamente per uso esterno. Utilizzare solo secondo le istruzioni. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di ignizione. Vietato fumare. Non perforare né bruciare nemmeno dopo l'uso. Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Altamente infiammabile. Conservazione Il prodotto deve essere protetto dall'esposizione solare e da temperature superiori a 50 °C. Validità confezionamento integro: 48 mesi. Formato Flacone da 50 ml. Cod. 423289