

EVA QU 12 SUPPOSTE AD AZIONE EFFERVESCENTE

Marchio: SO.SE.PHARM
Codice Min.: 933753170
Link: [clicca qui per acquistare](#)



eva/qu Dispositivo medico CE, classe I. La supposta eva/qu, è indicata in tutti casi in cui si avverte un ritardo nel regolare ritmo della defecazione, sia occasionale che ricorrente. L'assenza di sostanze farmacologicamente attive, che possono essere assorbite dall'organismo e causare effetti collaterali rendono eva/qu un prodotto valido ed efficace contro la stitichezza. La sua delicata azione locale e priva di effetti sistemici, consente l'uso della supposta anche durante periodi quali: gravidanza, allattamento, convalescenza, età avanzata, essendo indicata, inoltre, anche ai portatori di handicap motoria. La supposta eva/qu, è indicata, inoltre, prima della procedura mediche quali preparazione all'esplorazione rettale, prima di visite chirurgiche, gastroenterologiche, urologiche e

procto-rettoscopia. eva/qu rappresenta un valido aiuto durante viaggi, quando possono manifestarsi casi di stitichezza ostinata che devono essere contrastati con un pronto ed efficace effetto liberatorio. Modalità d'utilizzo Usare una o più supposte per ogni trattamento. La supposta eva/qu una volta introdotta all'interno della cavità anale si trova a stretto contatto con la temperatura corporea. Dopo circa 3-4 minuti la supposta si dissolve e sprigiona la CO₂ responsabile per l'effetto effervescente caratterizzato dalla produzione di tantissime micro-bollicine. Le "bollicine" formate esercitano un effetto locale "massaggiando" le pareti del retto. La supposta disciolta, inoltre, ammorbidisce le feci-stagnanti localizzate a livello dell'ampolla rettale promuovendo il distacco ed una veloce e soddisfacente evacuazione. Il ripetuto impiego, della supposta evaqu favorisce, inoltre, la riabilitazione del fisiologico meccanismo di defecazione "impigrito". Avvertenze Le supposte eva/qu per adulti non sono indicate in bambini e ragazzi sotto i 12 anni. Usare una o più supposte per ogni trattamento. Una sensazione di incompleto svuotamento o un modesto bruciore momentaneo non devono preoccupare. Si risolvono rapidamente. La supposta contiene polietilenglicole che può causare irritazione. Controindicazioni Non esistono controindicazioni all'impiego delle supposte evacuanti eva/qu. La supposta può essere utilizzata anche in presenza di emorroidi o lesioni locali - anche se usate frequentemente e prolungatamente. La supposta è composta da sostanze naturali e del tutto atossiche (bicarbonato di sodio, bitartrato di potassio) utilizzate anche in molte preparazioni alimentari. Formato Confezione da 6 o 12 pezzi. Cod. 714 / 720