

EVITA GINECOLOG UNGUENTO VAGINALE TUBO DA 30 G + 6 APPLICATORI VAGINALI MONOUSO

Marchio: Quality Farmac
Codice Min.: 938428240
Link: [clicca qui per acquistare](#)



Evita Ginecologico UNGUENTO VAGINALE Dispositivo Medico per il trattamento della secchezza della mucosa vaginale e vulvare. Unguento lubrificante, lenitivo della mucosa vaginale, indicato: - per il trattamento della secchezza della mucosa vaginale e vulvare; - per la lubrificazione della superficie esterna (senza cannula) anale o vaginale per facilitare l'inserimento dei dispositivi. Senza profumo e senza conservanti. Nichel tested. Dermatologicamente testato. Modalità d'uso Come lubrificante della mucosa vaginale: 1 applicazione vaginale per 6 giorni consecutivi o secondo parere medico. Come lubrificante della superficie esterna anale o vaginale per facilitare l'inserimento dei dispositivi: distribuire l'unguento senza l'uso della cannula. Modalità d'uso Come lubrificante della mucosa

vaginale: 1 applicazione vaginale per 6 giorni consecutivi o secondo parere medico. Come lubrificante della superficie esterna anale (senza cannula) o vaginale per facilitare l'inserimento di dispositivi: distribuire l'unguento senza uso della cannula. Modalità di applicazione con cannula: 1. forare il tubo utilizzando il perforatore del tappo di chiusura; 2. avvitare un applicatore vaginale; 3. premere il tubo sino al riempimento totale dell'applicatore; 4. svitare l'applicatore dal tubo, introdurlo in vagina e premere il pistone fino a termine della sua corsa; 5. estrarre l'applicatore e lo stantuffo, le cannule sono monouso. Avvertenze L'applicatore (cannula) è monouso. Gettare la cannula dopo l'applicazione. Uso topico. L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per instaurare idonea terapia. Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavarsi le mani dopo l'uso. Non utilizzare su ferite. Conservazione Conservare al riparo dalla luce in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro correttamente conservato. Formato Tubo da 30 g con 6 applicatori vaginali monouso