

## EXCILOR WARTS TRATTAMENTO 2 IN 1

**Marchio:** -  
**Codice Min.:** 974366799  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



excilor WARTS TRATTAMENTO 2 in 1 Descrizione Dispositivo medico per il trattamento delle verruche. Cura le verruche dall'interno (crioterapia) e dall'esterno (trattamento in gel). Elimina le verruche in modo rapido, in 5 giorni. L'ispessimento della cute causato dalla verruca e il virus responsabile vengono eliminati e la pelle si rigenera riacquistando il suo aspetto sano. Componenti Cryo-Active, TCA-Active (basato su Acido tricloroacetico), Carbopol, Acqua. Modalità d'uso Il primo giorno applicare la crioterapia una volta, seguita dal trattamento in gel il secondo giorno, 2 volte al giorno, per gli adulti, e 1 volta al giorno, per i bambini, per 4 giorni. Se si usa per la prima volta, nel caso siano presenti più verruche trattarne solo una per verificare l'effetto sulla propria cute. Iniziare a trattare un'altra verruca solo se non è comparso nessun effetto indesiderato (normalmente entro 5 giorni). Se vi sono più

verruche vicine tra loro (entro 1 cm), attendere che la pelle si sia normalizzata prima di trattare un'altra verruca (possono essere necessarie fino a 6 settimane). Se la verruca non scompare totalmente, il trattamento può essere ripetuto fino a 3 volte. Ripetere l'intero ciclo di trattamento dopo un intervallo di riposo di almeno 4 giorni - 1 settimana. Quando si tratta una verruca coperta da un callo, si consiglia di immergere il piede in acqua tiepida per 5 minuti e strofinare accuratamente il callo con una lima abrasiva prima del trattamento. Pulire accuratamente la punta dell'applicatore gel con un fazzoletto dopo ogni utilizzo e chiudere attentamente il dispositivo. Avvertenze Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non utilizzare con altri trattamenti per verruche. Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sul dispositivo e sulla scatola esterna. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Conservazione Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente (15-25°C) e tenere lontano dalla luce solare. Tenere lontano da fiamme, fonti di ignizione, fonti di calore, luce solare diretta e fonti elettrostatiche ed elettriche. Non esporre il dispositivo a temperature superiori a 50 °C. Periodo di validità dopo la prima apertura: 6 mesi. Formato Scatola contenente: - 1 dispositivo contenente 2 prodotti: un serbatoio crio da 11,5 ml con applicatore e un applicatore gel da 1 ml. - Sacchettino con 5 applicatori (spugnette).