

## FASCIA AUTORISCALDANTE A CALORE TERAPEUTICO THERMACARE SCHIENA 2 PEZZI

**Marchio:** THERMACARE  
**Codice Min.:** 981076060  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



ThermaCare FASCE AUTORISCALDANTI PER I DOLORI DELLA SCHIENA Descrizione Fascia di materiale soffice e confortevole con speciali celle brevettate che contengono componenti naturali (ferro, carbone, sale ed acqua) che al contatto con l'ossigeno dell'aria sviluppano calore. Se applicato per 8 ore, il calore costante di ThermaCare dona sollievo prolungato dal dolore no a 16 ore. Il calore prolungato, a temperatura costante, aumenta la circolazione del sangue nei tessuti, producendo effetti antidolori ci e rilassando la muscolatura, in quanto: - porta più ossigeno ai tessuti danneggiati, aiutando il muscolo a ritornare allo stato di

benessere; - stimola le terminazioni nervose, sensibili alla temperatura, interrompendo la trasmissione del dolore e favorendo così il rilassamento muscolare. Efficace e mirato contro i dolori muscolari e delle articolazioni dovuti ad affaticamento e tensione muscolare, distorsioni, stiramenti e artrite. Adatto per i dolori cronici e occasionali. Agisce direttamente sul punto del dolore. Non contiene farmaci. È facile da usare, confortevole da indossare, sottile, discreto, privo di odore. Monouso. Ha una taglia unica per uomini e donne. Clinicamente testato per rilassare i muscoli tesi. Modalità d'uso Aprire l'involucro quando si è pronti per l'uso. ThermaCare può impiegare fino a 30 minuti per raggiungere la sua temperatura terapeutica. Posizionare sull'area dolente con la parte più scura delle celle rivolta verso la pelle ed allacciare la fascia. Al di sopra dei 55 anni d'età, indossare ThermaCare sopra un sottile capo di vestiario (tessuto), non a contatto diretto con la pelle. Per una massima efficacia, vi raccomandiamo d'indossare ThermaCare per 8 ore. Il prodotto può essere gettato caldo o freddo tra i normali rifiuti domestici. Avvertenze Non utilizzare in caso di: - se il contenuto delle celle fuoriesce e/o la fascia è danneggiata; - con creme o unguenti medicati, cerotti o altre fonti di calore; - sulla pelle graffiata o escoriata; - su lividi e gonfiori comparsi nelle ultime 48 ore; - sulle zone corporee insensibili al calore; - da persone che non siano in grado di seguire tutte le istruzioni d'uso o che non siano in grado di rimuovere il prodotto da sole, inclusi bambini e anziani non autosufficienti. Chiedere il parere del proprio medico prima dell'uso nei casi di diabete, problemi di circolazione, malattie cardiache, artrite reumatoide e gravidanza. Questo prodotto può causare scottature. Per ridurre il rischio: - Controllare periodicamente la pelle per verificare la presenza di eventuali segni di irritazione o scottature e, nel caso si riscontrassero, sospendere subito l'uso. - Qualora si avvertisse una sensazione di calore eccessiva, interrompere l'uso o indossare ThermaCare sopra un capo di vestiario, non a contatto diretto con la pelle. - Al di sopra dei 55 anni d'età, il rischio di scottature aumenta con il passare degli anni, indossare

ThermaCare sopra un capo di vestiario e non utilizzare la fascia quando si dorme. - Per evitare un aumentato rischio di ustioni, rimuovere il prodotto prima di sottoporsi a esami RM (Risonanza Magnetica). - Non usare per più di 8 ore nell'arco di 24 ore. - Non esercitare una pressione eccessiva sul prodotto indossato. Interrompere l'uso e consultare un medico qualora si notasse fastidio, irritazione, bruciore, gonfiore, arrossamento o qualsiasi altro cambiamento persistente a livello della pelle nella zona dove si è indossato il prodotto oppure qualora il dolore aumentasse o rimanesse invariato dopo 7 giorni. Le celle che generano calore contengono ferro (circa 2 grammi). Se il ferro entra in contatto diretto con la pelle o con gli occhi rimuovere la fascia, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico immediatamente. Anche in caso di ingestione accidentale consultare il medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare di scaldare il prodotto in alcun modo (es. forno a microonde) o cercare di riscaldarlo, poichè la fascia potrebbe prendere fuoco. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione e sull'etichetta. Formato Confezione da 2 pezzi. Cod. F00573301024W