

FASCIA AUTORISCALDANTE VERSATILE THERMACARE XL 2 PEZZI

Marchio: THERMACARE
Codice Min.: 981076122
Link: [clicca qui per acquistare](#)



ThermaCare FASCE AUTORISCALDANTI VERSATILE XL
Descrizione Fascia di materiale soffice e confortevole con speciali celle brevettate che contengono componenti naturali (ferro, carbone, sale ed acqua) che al contatto con l'ossigeno dell'aria sviluppano calore. Il calore prolungato, a temperatura costante, aumenta la circolazione del sangue nei tessuti, producendo effetti antidolorifici e rilassando la muscolatura, in quanto: - porta più ossigeno ai tessuti danneggiati, aiutando il muscolo a ritornare allo stato di benessere; - stimola le terminazioni nervose, sensibili alla temperatura, interrompendo la trasmissione del dolore e favorendo così il

rilassamento muscolare. Efficace e mirato contro i dolori muscolari e delle articolazioni dovuti ad affaticamento e tensione muscolare, distorsioni, stiramenti e artrite. Adatto per i dolori cronici e occasionali. Agisce direttamente sul punto del dolore. Non contiene farmaci. È facile da usare, confortevole da indossare, sottile, discreto, privo di odore. Monouso. Clinicamente testato per rilassare i muscoli tesi. Modalità d'uso Aprire l'involucro quando si è pronti per l'uso. ThermaCare può impiegare fino a 30 minuti per raggiungere la sua temperatura terapeutica. Rimuovere la carta protettiva per scoprire il lato adesivo. Posizionare sull'area dolente e premere con decisione il lato adesivo sulla pelle. Fare attenzione durante l'applicazione a non sovrapporre le celle. Non utilizzare su viso, testa, seno, interno del braccio, ascelle, dita, basso addome, inguine, interno del ginocchio, piedi o dita dei piedi. Al di sopra dei 55 anni d'età, indossare ThermaCare sopra un sottile capo di vestiario (o tessuto), non a contatto diretto con la pelle. Per una massima efficacia, indossare ThermaCare per 8 ore. Il prodotto può essere gettato caldo o freddo tra i normali rifiuti domestici. Avvertenze Non utilizzare in caso di: - se il contenuto delle celle fuoriesce e/o la fascia è danneggiata; - con creme o unguenti medicati, cerotti o altre fonti di calore; - sulla pelle graffiata o escoriata; - su lividi e gonfiori comparsi nelle ultime 48 ore; - sulle zone corporee insensibili al calore; - da persone che non siano in grado di seguire tutte le istruzioni d'uso o che non siano in grado di rimuovere il prodotto da sole, inclusi bambini e anziani non autosufficienti; - non utilizzare su viso, testa, seno, interno del braccio, ascelle, dita, basso addome, inguine, interno del ginocchio, piedi o dita dei piedi. Chiedere il parere del proprio medico prima dell'uso nei casi di diabete, problemi di circolazione, malattie cardiache, artrite reumatoide e gravidanza. Questo prodotto può causare scottature. Per ridurre il rischio: - Controllare periodicamente la pelle per verificare la presenza di eventuali segni di irritazione o scottature e, nel caso si riscontrassero, sospendere subito l'uso. - Qualora si avvertisse una sensazione di calore eccessiva, interrompere l'uso o indossare ThermaCare sopra un capo di vestiario, non a contatto diretto con la pelle. - Al di sopra dei 55 anni

d'età, il rischio di scottature aumenta con il passare degli anni, indossare ThermaCare sopra un capo di vestiario e non utilizzare la fascia quando si dorme. - Per evitare un aumentato rischio di ustioni, rimuovere il prodotto prima di sottoporsi a esami RM (Risonanza Magnetica). - Non usare per più di 8 ore nell'arco di 24 ore. - Non esercitare una pressione eccessiva sul prodotto indossato ad esempio appoggiandosi a superfici dure, né indossarlo sotto vestiti stretti o cinture. Interrompere l'uso e consultare un medico qualora si notasse fastidio, irritazione, bruciore, gonfiore, arrossamento o qualsiasi altro cambiamento persistente a livello della pelle nella zona dove si è indossato il prodotto oppure qualora il dolore aumentasse o rimanesse invariato dopo 7 giorni. Le celle che generano calore contengono ferro (circa 2 grammi). Se il ferro entra in contatto diretto con la pelle o con gli occhi rimuovere la fascia, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare il medico immediatamente. Anche in caso di ingestione accidentale consultare il medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare di scaldare il prodotto in alcun modo (es. forno a microonde) o cercare di riscaldarlo, poichè la fascia potrebbe prendere fuoco. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione e sull'etichetta. Formato Confezione da 2 pezzi. Taglia XL. Cod. F00573301752W