

FASCIA ELASTICA POST OPERATORIA FUTURO LARGE

Marchio: -
Codice Min.: 922587377
Link: [clicca qui per acquistare](#)



FUTURO Fascia elastica post-operatoria che sostiene discretamente l'addome cadente favorendo il recupero dopo interventi chirurgici, o quando più ne si sente il bisogno. Indicato per il sostegno dei tessuti e della muscolatura addominale in seguito ad interventi, favorisce il recupero delle funzioni e del tono muscolare. Colore: bianco. Modalità d'utilizzo Come indossarlo: - Aprire la fascia e disporla sul letto, posizionare il lato morbido rivolto verso l'alto con l'etichetta in alto sul lato opposto. Sdraiarsi e posizionare la fascia sotto la schiena. Afferrare la banda ampia e stenderla sulla pancia o sulla medicazione chirurgica. - Espirare completamente e, con la mano destra, tirare il lato destro della fascia fissandolo all'altro lato. Deve essere aderente, ma confortevole. Raddrizzare la fascia, se necessario, per eliminare eventuali grinze. Istruzioni per la cura e il lavaggio: -

Chiudere il gancio prima del lavaggio. Lavare a mano con sapone neutro in acqua calda (non bollente). - Sciacquare bene e asciugare all'aria. Per maggiori dettagli è disponibile il video tutorial al link: <https://multimedia.3m.com/mws/media/1866578O/futuro-46200-01-abdomen-compression-support-mp4-italian.mp4> Avvertenze Non lavare in lavatrice, asciugare in asciugatrice, lavare a secco, oppure utilizzare candeggina o ammorbidenti. Formato M 101,6 - 116,8 cm. L 116,8 - 132,1 cm.