

## GEL GENGIVALE GENGIGEL TUBETTO 20 ML

**Marchio:** GENGIGEL  
**Codice Min.:** 900904513  
**Link:** [clicca qui per acquistare](#)



GENGIGEL GEL GENGIVALE Dispositivo Medico CE 0546, classe IIa. Indicato negli stati infiammatori (gengiviti, gengive sanguinanti, borse gengivali, retrazioni gengivali) o a seguito di traumi (ulcere, abrasioni provocate da protesi removibili o apparecchi ortodontici, pulizia con ultrasuoni, estrazioni dentarie o nella fase di guarigione da interventi sulla mucosa). Favorisce la guarigione e la riparazione dei tessuti orali. Modalità d'utilizzo Applicare da tre a cinque volte al giorno dopo i pasti principali, avendo provveduto ad una corretta igiene dentale. Continuare le applicazioni per 3-4 settimane fino alla scomparsa dei sintomi. Per ogni applicazione effettuare uno sciacquo orale con 10 ml di liquido, pari ad una dose, per 1-2 minuti. Il prodotto è pronto per l'uso, quindi non va

diluito. Dopo l'applicazione si suggerisce di non introdurre nel cavo orale cibo o liquidi per circa 30 minuti per evitare una prematura rimozione del prodotto. Componenti Acido ialuronico 0,025%; xilitolo; eccipienti. Formato Flacone da 20 ml. Cod. 883111