

GOCCE OCULARI KERATOSEPT 10 ML

Marchio: BRUSCHETTINI
Codice Min.: 942699606
Link: [clicca qui per acquistare](#)



KERATOSEPT Gocce oculari Descrizione Dispositivo medico. Idrogel acquoso sterile contenente: - alcool polivinilico, ad azione lubrificante, viscoelastica, mucoadesiva, protettiva; - dexpanthenolo, che appartiene alla classe delle vitamine del gruppo B, omologo dell'acido pantotenico, nutriente tissutale vitaminico, epitelio protettivo; - esamidina disetionato, poliesanide cloridrato e disodio edetato ed altri eccipienti, da utilizzare sui tessuti oculari mediante istillazione. Grazie alle proprietà dei suoi componenti, il dispositivo risulta efficace come coadiuvante nel processo di riepitelizzazione corneale, dopo stress causati da lenti a contatto, aria condizionata, irradiazione solare, da lampade artificiali o da videotermini. KERATOSEPT stabilizza quindi il film lacrimale e difende la superficie oculare in tutti i casi di disfunzione lacrimale, presente anche in pazienti soggetti ad infezioni oculari ricorrenti.

È perfettamente trasparente ed incolore. È miscibile con il liquido lacrimale in tutte le proporzioni. Ha valori di pH, viscosità, osmolarità perfettamente compatibili con i tessuti oculari e con il liquido lacrimale ed ha pertanto un elevato grado di tollerabilità. Modalità d'uso Istillare 1-2 gocce della soluzione del dispositivo nel sacco congiuntivale inferiore dell'occhio, esercitando una leggera pressione sul corpo del flaconcino. È consigliabile ripetere l'operazione 2-3 o più volte al giorno quando necessario. Componenti Alcool polivinilico 1,25%, dexpanthenolo 5%, esamidina disetionato 0,50%, poliesanide cloridrato 0,0001%, metilsulfonilmetano, disodio edetato, sodio fosfato bibasico, potassio fosfato monobasico, acqua depurata. Avvertenze Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Data l'assenza di sali ammonio quaternario, il dispositivo può essere utilizzato anche da portatori di lenti a contatto morbide e rigide. Non toccare l'occhio con la punta del contagocce. Non usare in caso di infezione degli occhi in atto. Non usare contemporaneamente ad altri colliri. Non usare in caso di incompatibilità nota verso qualsiasi componente della preparazione. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservazione Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Validità a confezionamento integro: 36 mesi. Validità post-apertura: 30 giorni. Formato Flacone da 10 ml Cod. 000070