


GOCCE OCULARI VISMED 20 FIALE MONODOSE 0,3 ML

Marchio: VISMED
Codice Min.: 4028694000133
Link: [clicca qui per acquistare](#)

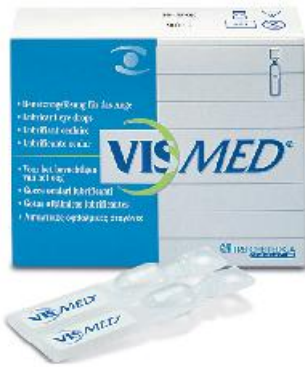

Vis Med GOCCE OOCULARI Dispositivo medico CE utile per la lubrificazione della superficie oculare in caso di sensazioni di secchezza, bruciore o affaticamento oculare e altri disturbi minori di nessuna importanza patologica causati, per esempio, dalla polvere, dal fumo, dal caldo secco, dall'aria condizionata, dal vento, dal freddo, dal prolungato uso del computer o dalle lenti a contatto (rigide o morbide). Sterile e senza conservanti. Modalità d'uso prima dell'uso rimuovere il cappuccio protettivo dal contenitore. Non toccare l'apertura. Capovolgere il contenitore tra il pollice e l'indice, assicurandosi che il pollice sia sulla parte finale del contenitore e che non ostruisce l'apertura. Il meccanismo deve essere messo in funzione varie volte fino all'emissione della prima

goccia della soluzione facendo pressione sul contenitore con l'indice. Inclinare all'indietro la parte finale e abbassare la palpebra inferiore con le dita della mano libera. Posizionare il contenitore appoggiando il pollice sulle dita che tengono la palpebra, assicurandosi che l'apertura sia direttamente sopra l'occhio aperto. Applicare al contenitore una pressione uniforme verso il basso con l'indice per instillare una goccia di soluzione nell'occhio, se non altrimenti suggerite mettere 1-2 gocce nell'occhio ogni qualvolta si renda necessario. Riporre il cappuccio protettivo dopo l'uso. Componenti lalurato di sodio; cloruro di sodio; cloruro di potassio; disodio idrogenofosfato; citrato di sodio; cloruro di magnesio; cloruro di calcio; acqua. Formato Confezione da 20 monodosi da 0,3 ml.