

GSE NASAL FREE SPRAY 20 ML

Marchio: GSE
Codice Min.: 924524073
Link: [clicca qui per acquistare](#)



GSE BIOTIC+ NASAL FREE Descrizione **GSE NASAL FREE** è una soluzione per uso nasale che aiuta l'eliminazione e il risciacquo del muco in eccesso dalle cavità nasali delle secrezioni secondarie a raffreddori, riniti e sinusiti, grazie alla presenza di glicerina. Inoltre il contenuto dell'agente filmogeno idrossipropilmetilcellulosa, consente la formazione sulla mucosa nasale di un film semi-liquido che protegge la mucosa dalla disidratazione. Grazie alla calendula, ricca di polisaccaridi, la soluzione svolge un'azione idratante, prevenendo irritazioni e modulando la secrezione nasale. **GSE NASAL FREE**, arricchito con altri estratti botanici, favorisce il ripristino delle condizioni fisiologiche della mucosa e contribuisce al sollievo dei sintomi comuni associati alla secchezza nasale di varia origine (come ad esempio fumo, agenti atmosferici, aria secca, aria condizionata, rinite e rinite allergica).

Modalità d'uso Verificare l'integrità della confezione e del flacone. Pulire delicatamente il naso. Rimuovere il cappuccio protettivo. Attivare la pompa esercitando ripetute pressioni fino a prima erogazione. Inserire l'erogatore nella narice. Spruzzare ½ volte in ogni narice. Reinscrivere il cappuccio protettivo. Ripetere l'operazione 3-4 volte al giorno. **Componenti** Glicerina vegetale, idrossipropilmetilcellulosa, estratto glicerinato di calendula (*Calendula officinalis*), estratto glicerinato di semi di pompelmo grapefruit (*Citrus x paradisi*), acqua di kiwi (*Actinidia chinensis*), estratto glicerinato di echinacea (*Echinacea angustifolia*), acido lattico, estratto glicerinato di timo (*Thymus vulgaris*), estratto glicerinato di cipresso (*Cupressus sempervirens*), estratto acquoso di altea (*Althea officinalis*), acqua purificata. Senza glutine. Senza conservanti, propellenti, alcool e senza glicoli. **Avvertenze** Non somministrare a pazienti con accertata ipersensibilità individuale ai componenti del prodotto. Non usare se il flacone appare danneggiato. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, nella sua confezione originale, ad una temperatura ambiente. Non ingerire. Dopo ogni utilizzo, si consiglia di pulire l'erogatore che viene a contatto con la mucosa nasale, in caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare con acqua. Richiudere con il cappuccio protettivo dopo l'uso. Ogni flacone deve essere utilizzato da un solo paziente al fine di ridurre il rischio di trasmissione di infezioni. Gettare ogni residuo di prodotto non utilizzato dopo la data di scadenza. Dopo l'uso, smaltir la confezione secondo le pratiche nazionali. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. La somministrazione del prodotto durante la gravidanza o l'allattamento deve avvenire sotto la supervisione del proprio medico o farmacista. **Conservazione** Conservare a temperatura ambiente. Tenere lontano da fonti di luce e calore. **Formato** Flacone spray da 20 ml. Cod. 0490