

GYNEXELLE HYALO-DUO GEL VAGINALE ANTI-SECCHENZA 50 ML

Marchio: BIONIKE
Codice Min.: 980253088
Link: [clicca qui per acquistare](#)



BioNike GYNEXELLE HYALO-DUOGEL VAGINALE ANTI-SECCHENZA Descrizione Dispositivo medico formulato per prevenire e trattare secchezza e atrofia della mucosa vulvo-vaginale, legate a condizioni fisiologiche particolari (post-partum, menopausa, climaterio) o conseguenza di irritazioni o stress localizzati. Grazie alle proprietà bioadesive dell'acido ialuronico, forma un film protettivo che ristabilisce e mantiene il corretto livello di idratazione della mucosa intima. Arricchito con ingredienti protettivi e lenitivi favorisce il fisiologico trofismo della mucosa e dona sollievo ai fastidi causati dalla scarsa lubrificazione intima. Grazie all'elevata tollerabilità e biocompatibilità è indicato anche

per trattamenti prolungati e in tutti quei casi in cui non si voglia o non si possa ricorrere a trattamenti farmacologici. Nichel tested. Modalità d'uso 1 applicazione al giorno per un periodo iniziale di almeno 7 giorni o fino a scomparsa dei sintomi fastidiosi. Il prodotto può essere applicato secondo diversa posologia secondo istruzioni del medico. Come mantenimento va utilizzato regolarmente 2-3 volte a settimana. Componenti Acido ialuronico sale sodico, pantenolo, proteine idrolizzate di lupino (*Lupinus albus*), acido lattico. Agenti gelificanti e stabilizzanti, acqua demineralizzata q.b. a 100. Senza glutine, conservanti e profumo. Avvertenze Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare con abbondante acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre al sole o al gelo. Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale ai singoli componenti. Il prodotto è compatibile con il lattice del preservativo. Il dispositivo non è sterile. Non usare su mucosa lesionata. Non usare insieme ad altri trattamenti vaginali se non su consiglio medico. Non è un contraccettivo. Non utilizzare come lubrificante. Non superare la posologia consigliata. Non usare se il contenitore primario è danneggiato. Non utilizzare dopo la data di scadenza. L'applicatore è monouso. Per motivi igienici, non conservare l'applicatore usato per un successivo riutilizzo. Non sono noti, al momento, effetti indesiderati specificatamente legati all'uso del prodotto. La sua biocompatibilità è stata verificata, ma in caso di fenomeni irritativi o allergici legati all'uso del prodotto, sospendere l'impiego e rivolgersi al proprio medico/ginecologo. Durante l'uso di prodotti per il trattamento della secchezza vaginale possono presentarsi lievi perdite biancastre e inodori. Conservazione Conservare tra 4°C e 30°C. Formato Tubetto da 50 ml con 10 applicatori monouso. Cod. 21271